

天翔颈椎牵引器——全绒（牵引颈椎）

产品名称	天翔颈椎牵引器——全绒（牵引颈椎）
公司名称	郑州天翔医疗器械有限公司
价格	38.00/个
规格参数	品牌:天翔 产品类别:颈椎牵引器 部位:颈部
公司地址	郑州高新区渠瑞一路路南
联系电话	13613805222 13333854999

产品详情

品牌	天翔	产品类别	颈椎牵引器
部位	颈部	型号	全绒
电源方式	不需要	工作方式	非电动
产地	北京	箱装数量	20
加印LOGO	可以	送礼用途	其他
适用送礼对象	其他	适用送礼场合	其他

特点：操作简单、舒适、牵引颈椎、改善症状

产品的性能：

挤压打气球，使其产生气压，经导管到达多层气室，在气体压力下，多层气室形成张力，通过止气滑轮调节其压力，对颈部固定达到牵引的作用。

禁忌症、注意事项、警示及提示的内容：

请勿刺激或压迫颈动脉窦。凡施各种重量的牵引力，患者自觉出现头晕、眼花、恶心时应徐徐放气，解除牵引，重新调整颈部位置，至前述症状消失，方可使用。牵引力超过20公斤以上，解除牵引力时应逐渐放气，快速放气有痛颈现象，休息一段时间可自行消失。如颈部细，使用时将多层气室尽量往后移，患者的下颌骨放在绒垫上，即可使用。

产品的主要结构：

本品由打气球、阀门、导管、止气滑轮、多层气室、颌枕衬垫组成。

产品的适用范围：

适用于颈椎病的牵引

安装和使用说明：

将多层气室围在颈部周围，押紧搭扣。将滑轮推向粗端，沿顺时针方向拧紧阀门，手握打气球，反复挤压。将滑轮推向细端，沿反时针方向松开阀门。将滑轮徐徐推向粗端，气体自动排出。

产品的维护和保养方法：

使用时严禁撕扯，以免粘接处漏气；本品可反复使用，禁止与有毒腐蚀性物品混合放置。