

# 天翔防褥疮气床垫B型——功率强大

产品名称	天翔防褥疮气床垫B型——功率强大
公司名称	郑州天翔医疗器械有限公司
价格	548.00/件
规格参数	品牌:天翔 产品类别:防褥疮垫 部位:背部
公司地址	郑州高新区渠瑞一路路南
联系电话	13613805222 13333854999

## 产品详情

品牌	天翔	产品类别	防褥疮垫
部位	背部	型号	A型
主体材质	高级PVC/PU面料	电源方式	直流
工作方式	电动	产地	北京
箱装数量	3	加印LOGO	可以
送礼用途	其他	适用送礼对象	其他
适用送礼场合	其他		

特点：

舒适耐用、功率强大、波动防褥疮

一、使用方法：

将气垫展开平铺于床上，条形袋体向上，把气垫上双路插管插牢在主机的两个气孔出口上。

将主机放稳，并将两相电源线插头牢固插入相应插座上。

打开主机电源开关，主机工作，开始充气。

充气强弱调节，顺时针转为“强”，逆时针转为“弱”。

开始使用时，主机对气垫充气约需20-30分钟后，使气垫全部充起，正常换气时，再让患者使用。

开始使用可将气泵调节到“强”快速充气，夜间使用或患者感觉气压变化强时可随时调节到“弱”档适

宜压力状态下使用。

## 二、特别提示：

为了保障气泵使用寿命，按上述操作程序开始使用后，请将气泵压力调节钮放至中档位置使用，长期使用中感觉气泵充气压力不足时，再将调节钮逐步增强，若长期将压力调节钮开至最大将影响本机使用寿命。

## 三、注意事项：

气垫应避免与利器、刀、针、钥匙等接触，以防割破床垫。

首次使用时，请检查不要气垫袋体底部各连接软管打折，通气导管不可硬拉或物体重压，以确保气道通畅。

气垫袋表面污浊时，不得用汽油、酒精清洗，需要清洗时请采用洗衣液或肥皂轻轻擦洗。

主机内部电子

## 四、售后服务

您所购产品保修期是从购买之日起六个月。

保修期内，可与本公司或经销商联系保修，超过保修期，本公司或经销商可根据顾客要求有偿修理。