

# 天翔人体健康秤A型/ B型——准确方便、快速测量

产品名称	天翔人体健康秤A型/ B型——准确方便、快速测量
公司名称	郑州天翔医疗器械有限公司
价格	82.00/个
规格参数	品牌:天翔 产品类别:人体健康秤 部位:体重
公司地址	郑州高新区渠瑞一路路南
联系电话	13613805222 13333854999

## 产品详情

品牌	天翔	产品类别	人体健康秤
部位	体重	电源方式	直流
工作方式	电动	产地	北京
箱装数量	10	加印LOGO	可以
送礼用途	商务送礼、其他	适用送礼对象	其他
适用送礼场合	展销会、其他		

特点：

准确、快速测量

### 一、基本规格

称量范围：2.5——180kg

分度值：0.1kg

显示方式：4位数液晶显示

电源：3v cr2032锂电池

工作温度：10—35摄氏度

称量单位：kg/lb

自动关机：10秒

低电压显示“lo”

出错显示：“---”

超重显示：“err”

## 二．操作说明

打开称下方电池盖板，将开关拨到所需单位，左端为“kg”，中间为切断电源，右端为“lb”。

手动开机后，将称置于水平面，会显示玻璃重量，等称自动关机，方可上称称重。

人稳定站在称面中间，开始称量，称量值稳定后，锁定称量值。

人体称量值显示，保持10秒后关机。

若开机显示“lo”表示电池已低效，应更换电池。

称量显示“---”表示称量出错，应重新开始。

保持干燥，勿碰水。

## 三．注意事项

手动开机后或将称移动后，应按照操作说明使用。

不使用时不要在称面上堆压物品，以免电池大量消耗，无法正常工作。

称量时双脚尽量靠中间站稳，以免滑倒。

人在称面上应平稳站立，以免无法锁定，显示不准确。

不能用力重击秤体。

不要放在有水渍的地方使用，不能用水冲洗。

出厂时已装置锂电池。