

医用阴道冲洗器的使用方法以及包装量

产品名称	医用阴道冲洗器的使用方法以及包装量
公司名称	山东乐金医疗器械有限公司
价格	99.00/套
规格参数	品牌:九尔 型号:JE-CXQ
公司地址	山东济宁高新区西浦路与苏南路交汇处第十二工业园
联系电话	0537-2988883 18660729977

产品详情

医用阴道冲洗器（妇科洗液）使用方便不刮伤人体；抗菌洗液中的妇科洗液，对皮肤及阴道黏膜具有抗菌修复作用。对人体无刺激。抗菌效果极好，对白色念珠菌等抑菌率可接近100%，可迅速杀灭细菌繁殖体、芽孢、真菌、霉菌及病毒等。

本品主要用于各种阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂及日常预防和消毒护理所需的阴道冲洗、会阴清洁消毒等。也可用于孕产妇的外阴清洁及日常护理。

九尔宜洁妇科洗液的【主要特性】

一、高度安全：急性经口毒性实验（LD50）6000mg/kg以上。皮肤一次性实验和变异原性试验全部为阴性。

二、广谱高效：原液对霉菌、真菌、白色念珠菌、0-157、芽孢及病毒、大肠菌、肺炎杆菌、退伍军人病菌、白癣病、绿脓菌等多种多样的菌和禽流感病毒（H5N3）均有很好的灭菌效果。

三、持续时间长：妇科洗液原液没有挥发性，能长时间保持抗菌效果。

【产品成份】

本产品由医用聚乙烯容器和医用聚乙烯阴道冲洗器及抗菌洗液组成；抗菌洗液的主要成分为苦参提取物、蛇床子提取物、黄柏提取物、金银花提取物、葡萄糖酸氯己定。这是一种纯植物萃取液，对人体无刺激，高度安全。

【产品优势】

A、优质冲洗器：九尔宜洁的冲洗器使用医用聚乙烯作为原材料，具有优良的生物相容性，无味、无毒

、不会对人体产生不良影响，并且采用软瓶身设计，挤压液体更轻松，不刮伤人体，多方位压力喷射式水流，使用起来对阴部冲洗器更为彻底。

B、使用方便：抗菌洗液、阴道冲洗器配套使用，操作方便，可以在医院使用，也可在家自行冲洗，方法简单。冲洗头方便拆卸，在个人专用的前提下，洗净后消毒可重复使用。

【使用方法】

- 1、阴道冲洗：取抗菌洗液40-50ml（冲洗器容量为50ml）直接灌入冲洗器，然后装上冲洗头即可使用。
- 2、使用时将冲洗头轻轻插入阴道深处，挤出全部药液2-3分钟，在捏住的状态下，缓缓从阴道抽出冲洗器。
- 3、外阴清洁：取本品适量后直接冲洗或湿敷。每天冲洗1-2次。

【产品特点】

有效杀菌：九尔宜洁采用的纯植物萃取液，是一种新型的搞笑广谱外用的杀菌消毒剂，可替代现有的消毒抗菌剂的局部消毒，以其良好的成膜性、可降解性、对人体无毒无害性、生物相容性、吸附性、抗菌性等优点，形成广谱物理抗菌膜，增强抗菌剂的抗菌性能，并保护粘膜，安全有效，孕产妇可用。

【安全可靠】

阴道冲洗器及洗液容器均采用医用聚乙烯作为原料，使用时安全无菌；抗菌洗液有效杀菌成分对人体无刺激。抗菌效果非常好，配合使用，有效杀灭有害菌，并能长时间保持抗菌效果。