

# 艾吉康藻酸盐无菌伤口敷料

产品名称	艾吉康藻酸盐无菌伤口敷料
公司名称	青岛明月海藻集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:艾吉康 集团:明月
公司地址	青岛市黄岛区明月路777号
联系电话	400-880-7699 13361482635

## 产品详情

非自粘型藻酸盐无菌伤口敷料：是由海藻酸钙纤维采用非织造工艺制成的敷料。

自粘型藻酸盐无菌伤口敷料：由医用胶布、敷芯和隔离纸组成。敷芯是由海藻酸钙纤维采用非织造工艺制成的敷料，隔离纸采用的是格拉辛纸。

### 【作用机理】

藻酸盐无菌伤口敷料应用于伤口上时，与伤口产生的渗出液接触后，其中的钙离子与渗出液中的钠离子发生交换，形成水溶性的海藻酸钠，使大量渗出液进入敷芯，于伤口表面形成一层亲水性的水凝胶膜，该水凝胶膜具有透氧性，能阻止细菌进入创面，并通过其湿润基质促进新鲜皮肤组织的生成，加快伤口愈合。

### 【产品性能】

1. 促进愈合：吸收伤口渗出液后形成的湿润微环境有利于伤口愈合。

2. 避免感染：原位形成的水凝胶可透氧、阻菌。
3. 加速止血：钙离子的释放，可加速止血。
4. 减轻疼痛：不粘连创面，避免伤口二次损伤。
5. 阻止扩散：有凝胶阻塞特性，能够阻止伤口渗出液横向扩散。
6. 使用安全：具有良好的组织相容性，对人体无毒性。
7. 保护环境：具有良好的生物降解性，不会对环境造成污染。

#### 【藻酸盐无菌伤口敷料适应范围】

1. 难愈性伤口和创面，如褥疮、糖尿病足溃疡、下肢溃疡等；
2. 中、重度渗出液伤口，如植皮供皮区及外伤等；
3. 损伤性出血创面，如手术后切口等；
4. 其他人体体表真皮浅层及其以上的浅表性创面，如皮肤擦伤、  
度及浅 度烧伤等。

#### 【非自粘型藻酸盐无菌伤口敷料使用说明】

1. 伤口准备：使用生理盐水清洗伤口，用无菌纱布轻轻蘸干伤口周边皮肤。
2. 使用说明：
  - a) 将敷料直接覆盖伤口表面，外面需二级包扎；
  - b) 根据伤口渗出液量及时更换敷料；
  - c) 更换或揭除敷料：除去二级包扎物，用生理盐水冲洗或辅助工具去除本产品。

#### 【自粘型藻酸盐无菌伤口敷料使用说明】

1. 伤口准备：使用生理盐水清洗伤口，用无菌纱布轻轻蘸干伤口周边皮肤。
2. 使用说明：
  - a) 取出敷料，剥离隔离膜，请勿接触敷料的敷芯；
  - b) 将敷芯部分完全覆盖伤口，同时将医用胶布粘贴于伤口周围皮肤，抚平、压紧；

c) 根据伤口渗出液量及时更换敷料。

【禁忌症】本品不适用于干燥型伤口，患有皮肤病或者皮肤易过敏者禁用。

【注意事项】

1. 本产品为一次性产品，严禁重复使用。
2. 依据伤口状态，决定更换频率，并使用至伤口痊愈为止。
3. 自粘型敷料要确保敷芯部分能够完全覆盖伤口，医用胶布部分不能直接接触伤口创面。
4. 治疗感染性伤口，需评估病人临床症状后，在医务人员指导下使用本敷料。
5. 本产品已进行辐射灭菌，若内包装袋破损请勿使用，也请勿灭菌后重复使用。
6. 在使用本产品过程中若出现过敏反应，请立即与医疗单位联系。
7. 请严格遵照说明书要求使用本产品。
8. 本产品使用后请按照医疗垃圾进行处理。

注册人名称 / 生产企业名称：青岛明月生物医用材料有限公司

生产许可证编号：鲁食药监械生产许 20140055号

医疗器械注册证编号：鲁械注准 20162640166

产品技术要求编号：鲁械注准20162640166

网址：<http://www.bmbm.cn>

集团官网：<http://www.bmscn.com>