

# 美国强生稳豪血糖仪试纸50片装

产品名称	美国强生稳豪血糖仪试纸50片装
公司名称	北京亿沃科技发展有限公司
价格	268.00/件
规格参数	品牌:强生 型号:稳豪 产地:美国
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5161房间
联系电话	010-52467259 13501089328

## 产品详情

品牌	强生	型号	稳豪
产地	美国	电源形式	纽扣电池
校正	芯片	血样	毛细血管全血
测量时间	5 (秒)	化验方法	电极法
自动关闭功能	有	适用工作温度	5~35 ( )
适用工作湿度	小于85 (%)	箱装数量	1 (台)
贸易属性	内贸	产品类别	家用血糖仪

咨询电话：010-88258863-807、801

什么是血糖？什么是糖尿病？

正常人体内含有一定浓度的葡萄糖，简称血糖。葡萄糖是生命活动中不可缺少的营养素，是人体所需能源的主要供给者。糖尿病是由于胰岛素分泌或作用缺陷，引起的以血糖升高为特征的代谢病。

正常人的血糖水平：

- 1、空腹血糖 <6.1mmol/l
- 2、餐后2小时血糖 <7.8mmol/l

糖尿病的几种类型：

- 1、i型：多在青少年期间（25岁以前）发病，表现为体内胰岛素明显缺乏，必须用胰岛素治疗。
- 2、ii型：中国人ii型糖尿病最多，约占90%，多在40岁以后发病。

3、妊娠糖尿病：孕期由于体内分泌的激素对胰岛素产生抵抗，从而引起血糖升高的症状。

4、其它类型糖尿病

糖尿病的诊断标准：

1、糖尿病症状+任意时间血浆葡萄糖水平  $>11.1\text{mmol/l}$

2、空腹血浆葡萄糖水平  $>7.0\text{mmol/l}$

3、糖耐量试验中，2小时血浆葡萄糖水平  $>11.1\text{mmol/l}$

为什么血糖仪装上电池，插入设定检验卡后不显示？

装上电池后，先按一下重置/功能设定键，再插入设定检验卡。

血糖仪的误差是多少？

国际上规定血糖仪的误差范围在 20% 以内，我司的产品误差在 10% 以内。

血液滴出后多久吸入试片？

血液滴出后，请在最短的时间内吸入到试片，尽量让血滴和试片在空气中停留的时间越短越好。

为什么家里测的血糖和医院测的不一样呢？

有以下几个原因：

（1）二者抽取的血样不同。血糖仪是从手指抽血，抽的是毛细血管全血中葡萄糖的含量；医院生化仪抽取的是静脉血，检测的是静脉血浆中葡萄糖的含量。一般来讲，空腹情况下两者较接近，餐后静脉血浆血糖值比毛细血管血糖值高 10%-15%。

（2）操作不规范。消毒皮肤的酒精要彻底挥发干净才可取血，因为皮肤上丝毫的酒精都会影响测量的结果。患者自测血糖有时把握不好，酒精未干就采血，这样测的结果就不准；还有，有的患者怕痛，所以将采血针的深度调的很浅，血量不够，测的结果也不准；再有，有的患者看血量不够时，就用手指挤血，因为挤血时血液中含有组织液，这时测出来的值就会偏低，也不准。另外还有未按说明书进行操作、试片受潮或失效都会影响测试的结果。

（3）测量时间不同，因此没有可比性。人体的血糖一天 24 小时是不停的变化，会受到自身激素水平的变化、情绪、饮食、运动等因素的影响。所以，不同一时间检测的结果可比性低。

本品是用于美国强生稳豪型血糖仪的专用血糖试纸。包装:50片/盒 (2瓶/盒)有效期：见产品外包装附带物品:附带50个原装针头