

# 退热凝胶走珠器 冷疗凝胶 厂家优质批发销售趋势

产品名称	退热凝胶走珠器 冷疗凝胶 厂家优质批发销售趋势
公司名称	山东乐金医疗器械有限公司
价格	68.00/盒
规格参数	品牌:山东九尔 型号:JE-LLNJ
公司地址	山东济宁高新区西浦路与苏南路交汇处第十二工业园
联系电话	0537-2988883 18660729977

## 产品详情

### 【退热凝胶走珠器 冷疗凝胶的作用机理】

九尔冷疗凝胶是将医用高分子交联技术和植物提取技术相结合而生产的一种新型降温产品：利用透皮技术将纯天然薄荷等成份透过皮肤表面深入到皮下真皮层，通过凝胶中水分气化及植物提取液天然降温特性，将体内的热毒散发出来，从而达到物理退热的效果。

冷疗凝胶\_退热凝胶\_降温凝胶\_退热凝胶走珠器\_降温仪\_

### 【产品名称】退热凝胶走珠器 冷疗凝胶

【产品性能结构】由走珠涂抹瓶和挥发性液体凝胶组成。挥发性液体凝胶含有薄荷、水、高分子物质(甘油)。

【作用效果】适用于冷敷理疗、物理退热，在发烧情况下使用冷疗凝胶可以快速降低体外温度。

【生产企业许可证号】鲁食药械生产许20120073号

【注册证号】鲁宁食药监械（准）字2014第1580026号

【产品标准号】YZB/鲁宁 0024-2014

【使用说明】外用，打开瓶盖，瓶口朝下，将塑料走珠器置于额头、太阳穴或大椎穴等处皮肤表面来回涂抹，每个部位可反复涂抹3至4次。为加快降温速度，可同时涂抹于腋窝、腘窝（膝盖内侧）、大腿和小腿内侧等部位

【储存条件、方法】密封，置阴凉处。

【有效期限】两年。

【型号规格】20ml、30ml、40ml、50ml

【注意事项】

- 1、伤口及眼、口、鼻部位不可使用（额头涂抹时需要将眼睛闭上，避免滴入眼睛，若不慎滴入眼睛，用清水冲洗即可）。
- 2、皮肤易过敏者,可先在手腕试用，待15分钟后无分析皮肤红、肿等异常现象，即可放心使用；若皮肤出现异常现象，请停止使用，并用清水清洗涂抹部位。
- 3、幼儿、儿童须在成人监护下方使用，避免误食。
- 4、若患者反复发热，可连续涂抹。
- 5、连续使用本品，高温持续不退，应请医生诊治。
- 6、本品不污染衣物，可放心使用。