

# 医学模型心肺复苏模拟人LDK/300型

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 医学模型心肺复苏模拟人LDK/300型         |
| 公司名称 | 上海联德科教仪器设备有限公司              |
| 价格   | 4000.00/台                   |
| 规格参数 | 材质:电脑.硅胶.工程塑料<br>品牌:上海LD-联德 |
| 公司地址 | 中国 上海市闸北区 海宁路1399号925室      |
| 联系电话 | 86 021 63800055 13901688673 |

## 产品详情

材质                      电脑.硅胶.工程塑料                      品牌                      上海LD-联德

### 产品介绍:

第八代ldk/cpr2011型高级全自动电脑心肺复苏模拟人，是经国内权威专家建议指导下，集国外同类产品之长处而开发的第四代新产品，是目前国内外功能最进，造型更完美，使用更方便的领先产品。并已申请国家实用新型专利。主要功能：模拟标准气道放开、胸外按压、人工呼吸等主要功能。并将操作程序分为：初学训练、单人考核、双人考核。每次胸外按压一次，心跳在液晶屏上显示一次，操作成功后，电脑显示器的液晶屏上显示正常动态心电图。心跳恢复正常，心脏自动恢复跳动的声音，瞳孔由散大自动缩小恢复正常，成绩报告打印等功能。

### 功能特点：

模拟标准气道放开/人工手位胸外按压/人工口对口呼吸（吹气）

操作方式：初学练习、单人考核、双人考核

语音提示：操作正确与错误语音自动提示

显示功能：1、数码显示操作情况各种计数、顺计时

2、红、黄、绿指示灯显示状态，反馈cpr按压深度、吹气量度

操作时间自动设定，工作频率随时可调

操作时或考核操作成功后，模拟人颈动脉自动搏动

考核操作成功后，瞳孔由散大自动缩小恢复正常

考核操作成功后，心脏自动恢复跳动声音

成绩打印功能：打印报告成绩

电源状态：

ldk/cpr300型采用220v电源，经过稳压器稳压输出电源24v。

材料特点：

面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料

标准套配置：

高级复苏全身人体模型一具；[[2011年新增一张头脸皮]]

高级电脑显示器一台；

豪华手拉推式人体硬塑箱一只；

屏障面膜(50张/盒)一盒；

可换肺袋五张；

热敏打印纸二卷；

使用说明书一本。  
复苏操作垫一条。

地址：天目中路749弄71号电话：021-63800055、63805999传真：021-63800  
mail:liangde518@sohu.com版权所有：上海联德科教仪器设备有限公司

#### 产品介绍:

第七代ldk/cpr400高级全自动电脑心肺复苏模拟人，是经国内权威专家建议指导下，集国外同类产品之长处及自主研发的第四代新产品，是目前国内外功能最进，造型更完美，使用更方便的领先产品。并已申请国家实用新型专利：模拟标准气道放开、胸外按压、人工呼吸等主要功能。并将操作程序分为：初学训练、单人考核、双人考核。每次胸外按压一次，心跳在液晶屏上显示一次，操作成功后，电脑显示器的液晶屏上显示正常动态心电图。模拟心跳，心脏自动恢复跳动的声音，瞳孔由散大自动缩小恢复正常，成绩报告打印等功能。

#### 功能特点：

模拟标准气道开放显示、语言提示；

人工手位胸外按压指示灯显示、数码计数显示、语言提示：

1.按压位置正确、错误的指示灯显示；数码计数显示；错误的语言提示。

2.按压强度正确(4-5cm区域)、错误(< 4-5cm < 区域)的显示分别由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示及错误的数码计数显示及错误的语言提示。

人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、数码计数显示、语言提示：

1.吹入的潮气量 500ml~600ml 的显示由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度；正确、错误的语言提示。

2.吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示。

按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）

操作周期：2次有效人工吹气，再按压与人工吹气30：2三个循环周期cpr操作。

操作频率：最新国际标准：100次/分。

操作方式：训练操作；考核操作(单人或双人)。

操作时间：以秒为单位计时。

语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

成绩打印：操作结果可热敏打印长条成绩单与短条成绩单。

检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程。

检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉搏动反应。

电源状态：

ldk/cpr400型采用220v电源，经过稳压器稳压输出电源24v。

材料特点：

面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料进口。

标准套配置：

高级复苏全身人体模型一具；

高级电脑显示器一台；

豪华手拉推式人体硬塑箱一只；

屏障面膜(50张/盒)一盒；

可换肺袋五张；

热敏打印纸二卷；

使用说明书一本。

复苏操作垫一条。

地址：天目中路749弄71号电话：021-63800055、63805999传真：021-63800  
mail:liangde518@sohu.com版权所有：上海联德科教仪器设备有限公司

#### 产品介绍:

第七代kar/cpr300高级全自动电脑心肺复苏模拟人，是经国内权威专家建议指导下，集国外同类产品之长处及自主研发的第四代新产品，是目前国内外功能最进，造型更完美，使用更方便的领先产品。并已申请国家实用新型专利：模拟标准气道放开、胸外按压、人工呼吸等主要功能。并将操作程序分为：初学训练、单人考核、双人考核。每次胸外按压一次，心跳在液晶屏上显示一次，操作成功后，电脑显示器的液晶屏上显示正常动态心电图。模拟心跳搏动，心脏自动恢复跳动的声音，瞳孔由散大自动缩小恢复正常，成绩报告打印等功能。

#### 功能特点：

模拟标准气道放开/人工手位胸外按压/人工口对口呼吸（吹气）

操作方式：初学练习、单人考核、双人考核

语音提示：操作正确与错误语音自动提示

显示功能：1、数码显示操作情况各种计数、顺计时

2、红、黄、绿指示灯显示状态，反馈cpr按压深度、吹气量度

操作时间自动设定，工作频率随时可调

操作时或考核操作成功后，模拟人颈动脉自动搏动

考核操作成功后，瞳孔由散大自动缩小恢复正常

考核操作成功后，心脏自动恢复跳动声音

成绩打印功能：打印报告成绩

电源状态：

kar/cpr300型采用220v电源，经过稳压器稳压输出电源24v。

材料特点：

面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料透

标准套配置：

高级复苏全身人体模型一具；

高级电脑显示器一台；

豪华手拉推式人体硬塑箱一只；

屏障面膜(50张/盒)一盒；

可换肺袋五张；

热敏打印纸二卷；

使用说明书一本。  
复苏操作垫一条。

地址：天目中路749弄71号电话：021-63800055、63805999传真：021-63800  
mail:liangde518@sohu.com版权所有：上海联德科教仪器设备有限公司