

304不锈钢消毒柜 医用手术器械消毒储存柜

产品名称	304不锈钢消毒柜 医用手术器械消毒储存柜
公司名称	山东道尔格医疗器械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:道尔格 型号:DEG5236
公司地址	济宁高新区开源路北11号
联系电话	0537-2360172 18553715603

产品详情

304不锈钢消毒柜 医用手术器械消毒储存柜

医用手术器械消毒储存柜 医用 消毒柜
手术器械消毒储存柜价格 手术器械消毒储存柜厂家

产品简介：

尺寸：长70cm 宽45cm 高120cm

容积：350L

产品功效：四层紫外线臭氧消毒

紫外线臭氧消毒柜的杀菌原理：

紫外线灭菌灯是通过紫外线的照射，破坏及改变微生物的DNA（脱氧核糖核酸）结构，使细菌当即死亡或不能繁殖后代，达到杀菌的目的。真正具有杀菌作用的是UVC紫外线，因为C波段紫外线很易被生物体的DNA吸收，尤以253.7nm左右的紫外线最佳。紫外线杀菌属于纯物理消毒方法，具有简单便捷、广谱高效、无二次污染、便于管理和实现自动化等优点。

适用于紫外线臭氧消毒的典型器械 1.各种型号的硬式软式内窥镜。
关节镜、囊肿镜、支气管镜、结肠镜、胃镜、十二指肠镜、胆镜、喉镜和肾镜等。

- 2.所有金属、橡胶、玻璃等器材。3.通常使用的热敏器械、骨科电钻等。
- 4.多种塑料制品：线筒、导管、透热缆线等。
- 5.特别适用于牙科器械及牙模。尤其是一些怕高温，怕潮湿，怕腐蚀医疗用品。

紫外线臭氧消毒柜使用注意事项:

- 1、紫外线灯管请勿直接触摸，消毒时不可直视，不得直接照射皮肤,以免引起损伤。
- 2、紫外线消毒时应达到足够剂量，如灯管强度低于70Uw/cm²时，应予以更换。或建立使用时间登记卡，使用时间超过5000H，应予以更换。3、使用过程中应保持紫外线灯管的清洁,一般每2周用酒精棉球清洁一次,发现灯管表面有灰尘、油污时，应随时擦拭。4、对使用中的紫外线应3~6个月用紫外线辐射照度仪做一次强度测试，定期检测紫外线的照射强度，以便达到良好的消毒。

联系人：陈经理 手机：18553715603

QQ：2039582580 邮箱：2039582580@qq.com地址：山东省济宁市高新区开源路11号