

医用阴道填塞（给药器）

产品名称	医用阴道填塞（给药器）
公司名称	山东九尔实业集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:九尔 型号:je-42
公司地址	山东省济宁市高新区第十二工业园
联系电话	13963728833

产品详情

医用阴道填塞给药器

[产品剂型]栓剂

【产品性能结构】由活性碳纤维、无纺布、无纺布拉绳、推助器组合而成。

【注册地址】山东省济宁市高新区第十二工业园

【生产地址】山东省济宁市高新区第十二工业园 【手机】13963728833

【固话】0537-2228833

【适用范围】

- 1、各类阴道炎、白带增多、有异味
- 2、宫颈炎和宫颈糜烂
- 3、各种妇科手术后的消炎止血、防治病菌感染
- 4、妊娠期阴道感染及其他生殖系统感染
- 5、预防性传播疾病

【产品特点】

有效吸附病菌，剖刷妊娠期妇女安全给药难题。

本产品不含有任何化学生产，无毒副作用、无刺激、无致敏性。

保持阴道内正常环境，不破坏乳酸杆菌的生长。

空害怕特殊处理的医用活性碳纤维具有选择吸附作用，对大量卫浴上皮组织糖原部分，具有维持人体健康及调节免疫力作用的软酸杆菌不产生吸附作用。

无抗药性，预防术后感染，促进伤口愈合，加速组织再生。

预充包装，使用方便、舒适、无污染、祛异味、止痒。

国家统一收费编码：阴道填塞311201005

【使用说明】

阴道放置。白天或睡前均可使用，放置时间5-9小时，每1支：症状严重者每日2支：8天一个疗程。

使用步骤：

1：清洁双手，打开包装，用拇指和中指捏住外导管拉绳反对着身体，先深呼吸，然后轻轻地把外导管推进阴道，如果导管推进去不太容易，可以再推进的同时轻轻旋转导管。

2：当你的手接触到身体时，捏住外导管，用食指将内导管完全推入内导管，使管芯离开导管进入阴道底部。

3：管芯已经推入阴道底部，轻轻地取出内外两支导管弃置，部分拉绳留在体外，更换时捏住拉绳轻轻拉出。上厕所时不要取出。【储存条件、方法】密封，置阴凉处。【有效期限】三年

【型号规格】阴道填塞型(1支装/盒、3支装/盒)【生产企业许可证号】鲁食药械生产许20120073号

【注册证号】鲁宁食药监械(准)字2014第1660025号【产品标准号】YZB/鲁宁 0023-2014

【注意事项】

1、本品为一次性使用，请勿重复使用。 2、有习惯性流产史的孕妇慎用。

3、月经期停用。