

# 韩国奥斯托KJ3000骨密度仪检测仪

产品名称	韩国奥斯托KJ3000骨密度仪检测仪
公司名称	广州华腾电子有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥斯托 型号:KJ3000
公司地址	广州白云区北太路敏捷科创中心1栋2楼032房
联系电话	020-37247686 13802420693

## 产品详情

产品名称：骨密度仪OSTEO KJ3000

产品参数：

测量部位：足跟骨

测量方式：全干式、双向超声波发射与接收

超声波参数：UBA、SOS、OI

探头频率：0.5MHZ ± 10%

测量时间： 25s

超声探头直径：31.75mm

操作系统：WindowsXP/7/8/10

使用温度：10-30

使用湿度：30-70%相对湿度

电源要求：AC220V  $\pm$  10%，50HZ

主机尺寸：645\*330\*360mm

主机重量：13kg

OSTEO KJ3000系列超声骨密度仪是南京科进与韩国骨密度仪制造商多年技术合作，综合中国国情研发的新一代跟骨超声骨密度仪。

仪器造型动感美观，系列产品全部采用油囊探头，舒适性好，测试结果精确稳定，采用全新一代硬件技术，软件界面设计更美观，操作更方便易学，具有更好的用户体验。

本品适合各类医疗和体检机构，可用于中老年人的骨质疏松症的筛查诊断和儿童青少年骨骼发育评估。

超声骨密度仪KJ3000

工作原理：通过向超声探头激励电脉冲，使超声探头发射超声波，超声波穿透被测试者足跟到达另一个超声换能器，由于超声波透过不同的骨质时，其超声速度和衰减也不相同，通过计算SOS（超声速度）和BUA（宽带超声衰减），超声骨密度仪得出被测者的T-Score（T值）、Z-Score（Z值）、BQI（骨质指数）等参数，并通过电脑显示或打印机打印，供医生诊断和参考。

适用范围：采用超声波检测足跟部位的骨密度值。

功能优势

更快捷

快速筛查，简单快捷，尤其适用于大量受检者普查

更精准

油囊探头，探头自动搜索zui佳信号

温度补偿系统，提高检测精度

全球区域数据库支持调用，根据受检者种族选择数据库

多级辅助脚板，根据受检者脚步大小选择，减少误差

更节省

无痛无创无辐射，可多次反复检测

QUS定量超声检测，尤其适用于孕妇，儿童等特殊群体

更权威

权威反映WHO骨质疏松诊断标准

更方便

OSTEO KJ3000+型 成人/儿童护腿板可更换

内置打印机快速打印

可外接平板电脑，随地随用