

莞康医用级材质洗鼻器制造商

产品名称	莞康医用级材质洗鼻器制造商
公司名称	东莞市万佳医疗科技有限公司
价格	398.00/盒
规格参数	品牌:莞康 型号:WJ/XBQ-D
公司地址	广东省东莞市万江街道简沙洲社区
联系电话	86-076922712525 18928294443

产品详情

洗鼻的重要性

国际权威医学机构实验显示：人类的鼻腔内细菌群有10000多种，比马桶上的细菌还要多400多倍，生活在城市里的人则更多，这些细菌主要体聚在鼻腔前庭的黏膜上，所以人体最脏的部位是鼻腔。卫生部门的专项调查显示，在病毒性流感、上呼吸道感染、肺炎等呼吸系统感染疾病中，80%是由鼻腔缺乏应有保健引起的，因此人类迫切需要洗鼻。国际权威医学机构对5项常规呼吸道疾病（流感、鼻炎、咽喉炎、肺炎、尘肺）做的临床试验结果为，坚持每天洗鼻一次的人较没有洗鼻习惯的人发病率流感减低80.5%，鼻炎降低92.3%，咽喉炎降低89.6%，肺炎降低75%，尘肺降低68.1%。洗鼻可以保持鼻腔清洁，保护鼻腔不受大量细菌的侵袭，就像我们刷牙洗手一样在生活中必不可少。但一般人用清水、用棉棒、用手指头来清理鼻腔，这些者是很不科学的洗鼻方式。

洗鼻器简介：洗鼻器是根据目前国外广泛推广的盐水洗鼻疗法，通过温盐水的杀菌作用，杀灭鼻腔内的细菌、过敏原等从而消除肿胀和水肿，有效舒缓鼻塞症状。那么，鼻腔洗鼻器那种好用 洗鼻器有哪些种类 洗鼻器(鼻腔冲洗器)，其实一般医疗院所早已使用，主要的功用在清洗鼻腔的分泌物和结痂，以减少鼻涕量和改善黏稠鼻涕所造成的不适。鼻腔冲洗器械经常使用温盐水，因为温盐水的浓度和人体体液最接近，比较适应；曾经出现的洗鼻器有：手压橡皮管型、塑料瓶型、喷雾型、蒸气型等多种。

莞康医用洗鼻器说明书 [产品名称]：鼻腔冲洗器 [规格]：WJ/XBQ-D
[注册证号]：粤械注准20152660355[专利证书号]:zl 2012 2 0274704.4 [产品标准]：YZB/粤东0008-2012 [主要结构]：莞康医用洗鼻器由瓶体、喷头、外盖、连接管组成。莞康专用洗鼻盐采用医用注射级氯化钠、柠檬酸、柠檬酸钠，经高科技提取及科学配方研制而成。[使用说明]：清洁双手，将温开水倒入洗鼻器，水温以自我感觉舒适为宜，至300毫升刻度线，取一袋洗鼻剂倒入洗鼻器内，盖好瓶盖、摇匀。根据需要选择喷头的出水模式（1.喷头收短锁住，水流为雾状2.喷头拉长，水流为柱状），将洗鼻器的喷头塞住一侧鼻孔，身体稍微向前倾，张嘴，用嘴呼吸，停止用鼻子呼吸，按压洗鼻器手柄，一按一松，有节奏进行，即可将洗液持续不断挤入鼻腔，开始洗鼻过程。[产品功效]：适用于临床五官科鼻腔患者中急慢性鼻炎，过敏性鼻炎，鼻息肉，鼻窦炎，各种鼻炎手术后及化疗后冲洗，鼻腔分泌物结痂冲洗，鼻部粘膜冲洗，职业性吸入粉尘的自我鼻腔卫生护理冲洗。[产品性能]:产品外观应本产品外观应光滑、清洁、无毛刺、异物、裂痕、无明显划痕；容积不少于明示标记的98%；喷头和连接管在使用时能保证液体正常喷出。瓶体装满液体密封后静置不渗漏；酸碱度（与空白对照液之差） 1，重金属含量 1μg

/ml，镉的含量应 < 0.1 μg/ml；细胞毒性反应计分为1或以下。 [注意事项]：

1、使用前先洗手。 2、使用前、后应用温水冲洗。 3、勿交叉使用。 4、使用过程中不要说话或吞口水，不要用鼻子呼吸，不要捏着两侧鼻子擤鼻，否则可能将洗鼻液进入耳朵，引起耳痛甚至中耳炎。 [储存方法]：本产品应在避光、密封、在阴凉干燥处储存。 [有效期]：三年
长期使用“莞康”洗鼻的6大好处 戒除挖鼻不雅行为、美化仪表 排除鼻腔毒素、减少鼻部黑头粉刺
清除鼻腔焦油、减少抽烟对肺的危害 通窍健脑、全面提高睡眠质量 增强嗅觉灵敏性、增进食欲
健肺养肺，延年益寿