

辐射铅防护服

产品名称	辐射铅防护服
公司名称	北京东方圆通科技发展有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	铅当量:0.35mmpb 型号:0.5mmpb 产地:国产
公司地址	北京市昌平区鼓楼南街1-603
联系电话	010-61446422 13301057943

产品详情

产品名称：铅衣(射线防护服、铅防护服、射线铅防护服、铅胶衣、铅裤、辐射防护服、辐射铅防护服、核医学射线防护服、放射科防护服、海关铅防护服、成人牙科防护围裙、儿童牙科防护围裙、牙科防护铅围裙)

产品型号：0.35mmpb、0.5mmpb

国际新型防护铅皮：现今国际上超轻、超薄、超柔软防护材料；与同类进口铅衣比较可减轻百分之二十五至三十的相对重量；

防护性能佳：铅分布十分均匀，正常使用铅当量不会衰减；提供0.35/0.5mmPb铅当量；耐磨、易清洗表面材料很大程度保护您的健康；

全新结构设计：采用多层材料制作，加上人性化结构设计，让您穿戴倍感舒适；

精密制作工艺：做工精雕细琢，一丝不苟，经久耐用，让您用得放心；

款式新颖、品种齐全：丰富的尺码，不管您胖瘦、高矮，总有一款适合您，就像为您量身定制；十几种款式、丰富的颜色可选，充分张扬您的个性。

说明：铅当量指前身铅当量；袖子和背面统一为0.25mmPb；

所有双面连体防护衣均赠送宽腰带；

提供17种标准尺码可选，若铅衣的宽度超过64或者长度超过1.2米时，价格需要另外加10%；

颜色：01深蓝，

02浅蓝，03枣红，04紫红，05墨绿，06军绿，07深灰，08紫罗兰，09粉，10咖啡，11宝石蓝，12深黄色

C101标准型前身单面铅防护衣:铅当量0.35mmPb，0.50mmPb

C102简易型前身单面铅防护衣:铅当量0.35mmPb，0.50mmPb

201无袖双面连体铅防护衣标准粘扣型:铅当量0.35mmPb，0.50mmPb

C202无袖双面连体铅防护衣重叠卡扣型:铅当量0.35mmPb，0.50mmPb

C211半袖双面连体铅防护衣标准粘扣型：铅当量0.35mmPb，0.50mmPb

C212半袖双面连体铅防护衣重叠卡扣型：铅当量0.35mmPb，0.50mmPb

C221长袖双面连体铅防护衣标准粘扣型：铅当量0.35mmPb，0.50mmPb

C222长袖双面连体铅防护衣重叠卡扣型：铅当量0.35mmPb，0.50mmPb

C301无袖双面分体套裙标准粘扣型：铅当量0.35mmPb，0.50mmPb

C302无袖双面分体套裙重叠卡扣型：铅当量0.35mmPb，0.50mmPb

C311半袖双面分体套裙标准粘扣型：铅当量0.35mmPb，0.50mmPb

C312半袖双面分体套裙重叠卡扣型：铅当量0.35mmPb，0.50mmPb

C321长袖双面分体套裙标准粘扣型：铅当量0.35mmPb，0.50mmPb

C322长袖双面分体套裙重叠卡扣型：铅当量0.35mmPb，0.50mmPb

C500背带库：铅当量0.35mmPb，0.50mmPb

儿童防护服：铅当量0.35mmPb，0.50mmPb

成人牙科防护围裙：铅当量0.35mmPb

铅衣的使用注意事项：

使用温度在25-40摄氏度,湿度不超过30%,保持室内通风干燥。

使用完毕，应置于干燥无阳光照射的木箱内。若长期受阳光照射高温曝晒，会加速胶皮的老化可能造成铅皮开裂现象，影响产品防护效果。

严格按照产品的说明与保养使用，可以延长产品的防护性能及使用期限，

产品不当的使用和保存，会导致铅橡胶材磨损或者老化脱落；不当的清洗和高温消毒也会导致液体渗入到产品层内的防护材料，使其加速老化；

射线防护产品储存要求：严禁与酸、碱等化学物品接触。

使用后应及时用温水和中性洗涤液轻柔擦掉铅衣表面污渍，严禁使用酒精、漂白剂、强酸强碱的洗涤剂清洗铅防护手套，严禁机洗或干洗，严禁高温高压消毒医用射线防护铅手套。