

新款大腔体V902激光洗纹身机

产品名称	新款大腔体V902激光洗纹身机
公司名称	北京福鹏光讯科技公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:福鹏 型号:V902 包装:木箱
公司地址	北京市朝阳区朝阳路71号
联系电话	010-57198608 13426241783

产品详情

新款大腔体v902激光洗纹身机、洗眉机

治疗范围：

一、q开关1064nm激光适合治疗太田痣、咖啡斑、雀斑、黑痣、老年斑、胎记、外伤性色素沉着、祛除黑色纹身、纹眉、纹唇、眼线等。二、q开关倍频532nm激光适合治疗红色或棕褐色纹身，纹眉，唇线，眼线。并可有效淡化红色或棕褐色胎记及各类浅层斑等。

治疗原理

激光洗纹身机利用的是激光的光爆破原理。是用固定波长的激光照射皮肤，激光穿透表皮层和真皮的乳头层，作用于皮肤内的微小色素团，色素团吸收激光的能量后受热膨胀并发生爆裂，爆裂后的色素颗粒由于失去了蛋白纤维包裹的保护作用，一部分（浅表皮内）会当即弹出体外，一部分（基底层内）会被人体内的巨噬细胞所吞噬，而后随人体淋巴系统排出体外。病变组织的色素将逐渐变淡直至消失，而周围正常皮肤由于不吸收固定波长的激光则不形成任何损伤。

技术参数：

激光类型：nd:yag激光 电源：220v 50hz 6a 激光波长：1064nm 532nm 重复频率：1-10hz（可调）脉冲能量：40-2000mj 外型尺寸：39x42x100cm 脉冲宽度 1-6ns
总重量：35kg 包装：木箱

洗纹身须知：

- 1.洗纹身后会有反色，受各体差异和色素浓淡的影响，反色会在几分钟到几小时后出现，这是正常现象。在洗文身后期修复过程中，颜色会逐渐变浅，直至消失。
- 2、洗纹身后治疗过程中，受各体和色料影响，部分会出现破皮及流血现象或产生水泡，这均属正常情况，但对于皮肤不易愈合和糖尿病人应当特别注意用药，不能感染，必要时可到诊所治疗。
- 3、洗纹身后治疗部位别总用手揉，2-3天内别碰水，如本人对某些食物过敏(如海鲜、辛辣等)则在治疗期间应忌食。
- 4、瘢痕体质者在治疗前要说明自身情况，这种客人一般建议不要洗，如一定要洗，要做好心理准备。
- 5、洗纹身后应注意防晒，经多次治疗的客人有可能会留下色素沉着印，洗文身后一般表现为褐色或偏红，需半年到一年的时间能完全修复好。
- 6、洗纹身后每次治疗间隔不能低于一个月，一般建议是两个月。
- 7、洗纹身后应注意观察皮肤修复情况，如皮肤长时间不愈合或出现感染者，应及时就诊。

扫一扫，轻松咨询：