

# 出口版便携式Q510激光洗纹身、洗眉机

产品名称	出口版便携式Q510激光洗纹身、洗眉机
公司名称	北京福鹏光讯科技公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:福鹏 型号:Q510 包装:航空箱
公司地址	北京市朝阳区朝阳路71号
联系电话	010-57198608 13426241783

## 产品详情

### 出口版便携Q510洗纹身机、洗眉机

治疗范围：

- 一、Q开关1064nm激光适合治疗太田痣、咖啡斑、雀斑、黑痣、老年斑、胎记、外伤性色素沉着、祛除黑色纹身、纹眉、纹唇、眼线等。
- 二、Q开关倍频532nm激光适合治疗红色或棕褐色纹身，纹眉，唇线，眼线。并可有效淡化红色或棕褐色胎记及各类浅层斑等。
- 三、黑脸娃娃功效：美白嫩肤、收缩毛孔、紧致肌肤、抑制痤疮。

治疗原理

激光洗纹身机利用的是激光的光爆破原理。是用固定波长的激光照射皮肤，激光穿透表皮层和真皮的乳头层，作用于皮肤内的微小色素团，色素团吸收激光的能量后受热膨胀并发生爆裂，爆裂后的色素颗粒由于失去了蛋白纤维包裹的保护作用，一部分（浅表皮内）会当即弹出体外，一部分（基底层内）会被人体内的巨噬细胞所吞噬，而后随人体淋巴系统排出体外。病变组织的色素将逐渐变淡直至消失，而周围正常皮肤由于不吸收固定波长的激光则不形成任何损伤。

## 激光洗纹身&洗眉治疗图：

### 技术参数：

- 1.激光类型：ND：YAG激光
- 2.波 长：532nm、1064nm 双波长 黑脸娃娃柔肤镭射头（碳粉一只）
- 3.脉冲能量：10-2000MJ 4.脉 宽：1-6ns 5.光斑面积：1-6mm
- 6.重复频率：1.2.3.4.5.6,7,8,9,10Hz 7.电 源：AC 220/110V 50/60Hz
- 8.输入功率：500W 带预燃 输出功率：1000W 9.显示器：真彩触摸屏
- 10.仪器尺寸：450x280x300(mm) 11.重 量：20KG 航空箱
- 12.制冷方式：风冷+水冷+散热系统

### 激光洗纹身后的护理及注意事项

- 1.治疗时可能出现轻微疼痛，也可出现短暂的红肿等反应，会自行消失。
- 2.痂膜7—14天脱落，创面愈合。个别患者术后可能出现正常的暂时性色素沉着，会逐渐吸收。口服维生素C可减轻色素回流。
- 3.激光洗纹身愈合期间，可涂抗菌软膏或口服消炎药防止继发感染。避免阳光紫外线直接照射。否则会产生短暂的色素沉着，感染后可能会出现疤痕。
- 4.痂皮脱落以前治疗区不接触水，不化妆，不搓擦，忌辣、烟和酒。近期内禁食颜色深的食物如：咖啡、百事可乐等，要让痂皮自行脱落，不得强行剥落。不参加激烈运动，以免出汗后引起感染。
- 5.凡色素性皮肤病治疗后，一定要注意防晒，色素消退是一个缓慢的生物学过程，一般为1—2.5个月，此期间一定要继续防晒。为获得最佳效果，须重复治疗者，应间隔3个月以上。
- 6.根据病变的性质色素的深浅和部位，某些病种激光洗纹身治疗可能要进行多次。

## 扫一扫，轻松咨询：

北京福鹏光讯科技有限公司为了让您放心，免除外地客户后顾之忧可办理货到付款业务（请确认您那里有德邦物流），本公司产品款式众多，具体需要可网上或实地详谈。公司拥有完整、科学的质量管理体系。售前专业的客服讲解，售后专业技术人员跟踪指导。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可，价格实惠、供货及时、订货手续简便。诚招代理商加盟！

电话：13426241783

微信：1243434406

QQ：1503129607