

# 便携式厂家直销大腔体V9洗眉激光机

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 便携式厂家直销大腔体V9洗眉激光机        |
| 公司名称 | 北京福鹏光讯科技公司               |
| 价格   | 8000.00/台                |
| 规格参数 | 品牌:福鹏<br>型号:V9<br>包装:航空箱 |
| 公司地址 | 北京市朝阳区朝阳路71号             |
| 联系电话 | 010-57198608 13426241783 |

## 产品详情

### 便携式厂家直销大腔体V9洗眉激光机

治疗范围：

一、Q开关1064nm激光适合治疗太田痣、咖啡斑、雀斑、黑痣、老年斑、胎记、外伤性色素沉着、祛除黑色纹身、纹眉、纹唇、眼线等。二、Q开关倍频532nm激光适合治疗红色或棕褐色纹身，纹眉，唇线，眼线。并可有效淡化红色或棕褐色胎记及各类浅层斑等。

治疗原理

激光洗纹身机利用的是激光的光爆破原理。是用固定波长的激光照射皮肤，激光穿透表皮层和真皮的乳头层，作用于皮肤内的微小色素团，色素团吸收激光的能量后受热膨胀并发生爆裂，爆裂后的色素颗粒由于失去了蛋白纤维包裹的保护作用，一部分（浅表皮内）会当即弹出体外，一部分（基底层内）会被人体内的巨噬细胞所吞噬，而后随人体淋巴系统排出体外。病变组织的色素将逐渐变淡直至消失，而周围正常皮肤由于不吸收固定波长的激光则不形成任何损伤。

## 技术参数：

激光类型: ND:YAG激光 电源：220V 50HZ 6A 激光波长 :1064nm 532nm 重复频率 :1-10HZ (可调) 脉冲能量：10-2000mj 外型尺寸 :500x350x320cm 脉冲宽度 1-6ns 总重量 25kg

## 激光洗纹身后的护理及注意事项

- 1.治疗时可能出现轻微疼痛，也可出现短暂的红肿等反应，会自行消失。
- 2.痂膜7—14天脱落，创面愈合。个别患者术后可能出现正常的暂时性色素沉着，会逐渐吸收。口服维生素C可减轻色素回流。
- 3.激光洗纹身愈合期间，可涂抗菌软膏或口服消炎药防止继发感染。避免阳光紫外线直接照射。否则会产生短暂的色素沉着，感染后可能会出现疤痕。
- 4.痂皮脱落以前治疗区不接触水，不化妆，不搓擦，忌辣、烟和酒。近期内禁食颜色深的食物如：咖啡、百事可乐等，要让痂皮自行脱落，不得强行剥落。不参加激烈运动，以免出汗后引起感染。
- 5.凡色素性皮肤病治疗后，一定要注意防晒，色素消退是一个缓慢的生物学过程，一般为1—2.5个月，此期间一定要继续防晒。为获得最佳效果，须重复治疗者，应间隔3个月以上。
- 6.根据病变的性质色素的深浅和部位，某些病种激光洗纹身治疗可能要多次。

## 关于售后

厂家货源正品：厂家直销，保证质量、价格实惠、供货及时、订货手续简便。公司尊崇“踏实、拼搏、责任的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。

关于颜色：因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异。

## 关于客服：

您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问，您可以直接给我们留言或直接与我们客服联络，我们将在收到您的信息后，会第一时间及时与您联络，我们衷心的希望能与各届朋友合作，携手福鹏，共创未来。客服QQ：1503129607,1243434406 微信/电话:13426241783

## 关于售后：

我们的产品提供一年保修，终身维护，除了耗材和人为损坏。依靠我们的专业知识与技术，做一个让所有客户都满意的企业。

## 关于发货：

我们合作的物流：德邦物流，安能物流，百世快运，天地华宇，佳吉快运；合作的快递：默认全峰快递，德邦快递。如需发其它物流或快递，请提前与客服沟通。

扫一扫，轻松咨询：

北京福鹏光讯科技有限公司为了让您放心，免除外地客户后顾之忧可办理货到付款业务（请确认您那里有德邦物流），本公司产品款式众多，具体需要可网上或实地详谈。公司拥有完整、科学的质量管理体系。售前专业的客服讲解，售后专业技术人员跟踪指导。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可，价格实惠、供货及时、订货手续简便。诚招代理商加盟！