

高级婴儿气管插管模型,婴儿气道插管模型

产品名称	高级婴儿气管插管模型,婴儿气道插管模型
公司名称	上海学育科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:学育医学 型号:XY/3A 产地:上海
公司地址	上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄7号140室
联系电话	021-66250087 13918131012

产品详情

XY-3A高级婴儿气管插管模型使用富有弹性的PVC树脂制成，为尽量接近临床实际操作和示教实习，特意加重底座，其上固定架的活动套圈与颈部相连，使模型头放平时呈稍向后仰的倾斜位。

一、模型功能：

- 1、婴儿的舌、口咽、会厌、喉、声带和气管的真实解剖；
- 2、逼真的新生儿解剖结构；
- 3、经口、鼻、气管插管；
- 4、仿真材料的功能模拟；
- 5、可以通过吹气方式、测试插管是否正确的插入气道；
- 6、观察双肺与胃的供气膨胀。

二、标准配置：

- 1、婴儿气管插管模型：1个；
- 2、气管插管：1根；
- 3、说明书：1张；

4、保修卡：1张；

5、合格证：1张。

三、使用方法：

1、操作者站模型头侧，将头后仰80度，使口、咽、气管基本重选一条线，将口张开；

2、使用时口、咽、喉先喷以肥皂水和洗涤精进行；

3、左手握喉镜把镜片伸入舌根，向上提拉，此时就会看到会厌软骨，将镜片逐渐移至舌根会厌各处，继续上提镜片，会厌软骨就会反跳复牢镜片，其下的菱形气管口便清晰可见。右手拿气管内导入伸入口内与润滑剂接触后，在直视下将导管插入气管；

关于气管导管是否插入气管，有三种检查方法：

A：模型头部颈部截面通出的半透明气管支气管部分可看到模型气管导管；

B：把模型头竖起来，在其后孔内扳开咽后壁可见气管导管是否已插入气管内；

C：用气囊面罩复苏器的面罩端改接气管导管，予以加压充气，模型肺就会扩大，说明导管插在气管内。

经鼻插管时同样先在一侧鼻孔喷上润滑剂，然后将气管导管插入一侧鼻孔向后下方通过鼻道进入咽喉部，再在喉镜直视下用插管钳把气管导管引入气管内，检查方法与经口插管相同。

注：口、咽、喉喷润滑剂的目的就是使模型与活的新生儿窒息复苏时口内条件相接近。同时也可减少模型损坏，延长使用寿命，气管插管的操作不必过多用力，以免损伤模型。