

# 高级灌肠和辅助排便训练模型\_XY-15

产品名称	高级灌肠和辅助排便训练模型_XY-15
公司名称	上海学育科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:学育医学 型号:XY/15 产地:上海
公司地址	上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄7号140室
联系电话	021-66250087 13918131012

## 产品详情

### 一、模型特点：

- 1、XY-15高级灌肠和辅助排便训练模型是我公司最新开发的专门针对长期卧床病人或年老无力病人进行灌肠排便和人工辅助排便的教学操作训练模型。
- 2、模型从外形内部均以正常人体解剖为依据，可进行甘油灌肠或采用人工手指在直肠内排除模拟粪块的操作要求。
- 3、具有形象逼真、操作真实、经久耐用等特点，是临床医学教学和训练的理想产品，可在模型上使用临床标准器械进行灌肠练习，操作过程要如同在真人身上进行一般。

### 二、模型功能：

- 1、模拟长期卧床病人或者年老无力的排便病人，仿真人的尺寸大小，精准的解剖结构。
- 1、具有标准的灌肠体位，左侧卧位，左腿自然伸直，右腿屈曲。
- 2、解剖结构准确，具有肛门、直肠结构，有模拟肛柱，在灌肠插管过程中有真实的阻滞感。
- 3、可注入模拟灌肠液，使用肛管插管灌肠法。
- 4、可进行甘油注射灌肠（从腹部侧方的排液管流出）。
- 5、可行多种灌肠操作包括大量、小量、保留、不保留灌肠，可反复操作并真实的灌入液体，灌入的液体不会逆向流出。
- 6、腹壁可打开，可从透明的肠内看到灌肠导管的末端。

7、模型结构便于拆装、清洗，模型内的液体可方便引出。

### 三、使用方法：

1、插管灌肠法：模拟采取左侧卧位，将灌肠筒挂于输液架上，筒内液面高于肛门40-60cm，连接肛管，润滑肛管前段，排尽管内气体后夹管，并将肛管缓慢插入直肠7-10cm，固定肛管，放开管夹，使灌肠液（清洁水模拟液500-100ml）缓慢流入，夹管后拔出肛管，随后再排出模拟排泄物至盆容器内。

2、甘油灌肠法：模型采取左侧卧位，将腰腹部的肠部末端胶口与输液架上的装有500-1000ml模拟排泄物（用清水代替）灌肠筒胶管进行连接，夹紧胶管，然后将甘油窗口缓慢插入直肠内，注入完甘油后，抽出甘油容器，稍后将管上的夹子放开，模拟排泄物随后从肛门内排入盆窗口内。

3、人工取便法：先打开腹壁皮肤，暴露乙状结肠和直肠，断开乙状结肠与直肠的连接口，将模拟粪便放入直肠内，重新将乙状结肠与直肠进行连接，然后操作人员带上乳胶手套，润滑手指，自肛门缓慢插入直肠内，将模拟粪使用指挖出。