

高级透明刮宫模型,刮宫训练模型

产品名称	高级透明刮宫模型,刮宫训练模型
公司名称	上海学育科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:学育医学 型号:XY/T32 产地:上海
公司地址	上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄7号140室
联系电话	021-66250087 13918131012

产品详情

刮宫操作为器械流产的一种方式，在实际教学中，学生只是进行理论学习，没有动手的机会，而且具体操作时要求的是通过手感判断胎囊的位置，没有动手的机会，而且具体操作时要求的是通过手感判断胎囊的位置，由于不能看到时期宫腔内的结构，所以学生很难理解掌握。高级透明刮宫模型就是通过透明的结构演示刮宫的过程和吸宫器、刮宫器在子宫内所处的位置，加深学生的理解，它既可以让初学者学习妇产科相关解剖知识，练习扩宫、刮宫等相关操作，又有助于教师在课堂上示教讲解使用。

一、模型功能：

- 1、透明的外壳、结实、美观、可以观察到盆腔内部结构，操作时可观察操作步骤是否正确。
- 2、阴道弹性良好，可以使用阴窥器，子宫材料柔软富有弹性，外形真实。
- 3、外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇，小阴唇，尿道，阴道结构正常。
- 4、内部解剖结构逼真：子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管。
- 5、透明的子宫可见妊娠6-7周左右的妊娠囊。
- 6、尿道可以进行导尿操作、女性膀胱冲洗。
- 7、宫颈口可插入扩宫器、刮匙。
- 8、带有底托，可使子宫固定在正确位置。
- 9、透明刮宫演示模型前倾位、水平位、后倾位。

二、使用方法：透明刮宫演示模型正面结构

- 1、先用润滑剂润滑阴道及外阴部；
- 2、用器械将模拟胎囊放入高级透明刮宫模型子宫内；
- 3、将阴道窥器润滑后放入阴道；
- 4、将刮勺润滑后插入子宫，模拟刮宫操作。

三、标准配置：

- 1、透明刮宫模型：1台；
- 2、手提式铝塑箱：1个；
- 3、说明书：1份；
- 4、保修卡：1份；
- 5、合格证：1份。