

# 三管全绒铜阀球颈椎牵引器 医用颈椎牵引器

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 三管全绒铜阀球颈椎牵引器 医用颈椎牵引器     |
| 公司名称 | 衡水安佳医疗器械有限公司             |
| 价格   | 18.00/件                  |
| 规格参数 | 品牌:安佳                    |
| 公司地址 | 魏屯镇于庄村108号               |
| 联系电话 | 0318-8960090 18832830980 |

## 产品详情

全国包邮，当天发货

360°全方位颈椎防护牵引器

全绒面料、加厚内胆、三管充气

宝石蓝、玫瑰红、深灰色、紫罗兰4色可选

产品名称：三管全绒颈椎牵引器

产品材质：内（乳胶型气囊）外（进口绒布）

产品颜色：宝石蓝、玫瑰红、深灰色、紫罗兰

产品功效：缓解颈椎酸痛，颈部不适等疾病

产品特点：

- 1.采用前低后高的人体工学设计，佩带舒适
- 2.优质pvc内胆绒布面料，无刺激，透气性好
- 3.高粘力强力魔术贴紧绷不易脱落
- 4.大号充气球延长使用寿命

上网人群逐年增加，长时间久坐90%的人患有颈椎问题

据第七次全国颈椎病学术会议介绍：

- 1.全国约有7%-10%的人患有颈椎病
- 2.40岁以下患者过半数
- 3.久坐工作者90%存在颈椎问题
- 4.其他发病率15%

颈椎病的10大可怕症状，您了解吗？

- 1.头重发麻、手指发麻、上肢无力等
- 2.反复发作的颈腰背痛、酸软
- 3.不明原因的失眠多梦、记忆力下降
- 4.不明原因的心律不齐，类似心绞痛的症状
- 5.不明原因呼吸、消化、内分泌功能紊乱
- 6.久治不愈的头晕、头痛或偏头痛
- 7.长期的低血压或莫名其妙的高血压
- 8.总是降头歪向一侧或反复落枕
- 9.非耳部原因的持续耳鸣或听力下降
- 10.长期打呼噜

如不及时治疗或预防会使颈椎病更加严重！所有您非常需要一台便携的颈椎牵引器，长期使用可缓解颈椎部疼痛，同时矫正脊柱！

安佳三管全绒颈椎牵引器怎么使用？

- 1.按正确方法戴好便携式颈椎牵引器，初用者可先照着镜子佩戴，调节颈围大小，固定前部上、中两个尼龙搭扣，以适合不同颈围的人使用。

- 2.充气球打气前请拧紧放气螺母。
- 3.用充气球打气直到患者感觉力度合适，症状减轻为止。
- 4.牵引固定治疗每天至少 2 - 3 次，每次至少30分钟左右。
- 5.使用后拧松放气螺母，缓慢放气。

安佳三管全绒颈椎牵引器有什么注意事项？

- 1.治疗时尽量使颈部放松，慢慢加气压，以增强牵引效果。
- 2.充气时应循序渐进，不要过猛，在做牵引治疗出现头晕等异常反应时，应徐徐放气，直到不应有的症状消失，再重新调整使用。
- 3.大力牵引前应做30分钟小牵引，牵引复位时应在医生指导下进行。
- 4.使用时避免气囊接触坚硬物体，牵引器表面有污迹时，可在充气后用软毛刷粘水清洗，不可水泡、用力揉搓或刷洗。
- 5.勿将该产品靠近高温高热。