

焯美多功能老人智能拐杖 厂家诚招代理

产品名称	焯美多功能老人智能拐杖 厂家诚招代理
公司名称	深圳市焯美科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:焯美 功能:通话 MP3 定位 手电筒 上市时间:2015
公司地址	广东省深圳市龙华新区富景大厦
联系电话	18188618676

产品详情

焯美科技专业生产智能拐杖7周年，可做户外登山，老人拐杖，是一款多功能、智能拐杖。

售后服务：严格按照国家规定三包政策，7天包退，15天包换，一年保修。

功能介绍：

1、SOS紧急呼救

1) 智能拐杖系统开启，长按“SOS按键”几秒，直到智能拐杖开始拨打SOS号码，才表示紧急求救功能开始工作。紧急呼救开启后，拐杖会自动循环拨打APP上已设置的SOS号码两次，如果无人接听，则拐杖会自动发出报警声（大于80分贝，以便引起路人注意）。如果需要停止拨号，短按“电源键”挂掉；如果需要中断报警，则短按“SOS按键”。

2) 如果关爱者没有及时接听求救电话，看到未接电话后，可以直接回拨或者通过APP查询拐杖使用者当前定位，了解最新状况。

2、GPS实时定位

实时定位：APP点击“实时定位”按钮可对智能拐杖进行反向定位，可查询拐杖使用者的最新定位信息并实现一键导航。

3、历史轨迹查询

历史轨迹：点击“轨迹查询按钮”可查看智能拐杖以往所有的行走轨迹，点击轨迹点可显示定位时间与具体位置。

4、FM收音机/MP3播放器

1) “F/M”功能：当智能拐杖开启时，短按“功能按键”，可以打开“收音机”或“播放器”播放模式，并且可以实现搜索上一台、搜索下一台随意切换。再次短按则是在二者之间做切换模式，长按几秒可关闭。音量调节：用音量按钮“+”或“-”来操作。

2) MP3功能：当智能拐杖开启时，短按“功能按键”，可以打开“收音机”或“播放器”播放模式，并且可以实现上一首、下一首随意切换。再次短按则是在二者之间做切换模式，长按几秒可关闭。音量调节：用音量按钮“+”或“-”来操作。

5、手电筒照明

1) 三档开关：由上至下分别为“照明”、“闪灯”、“关闭”三个档位。

2) “照明”档：如果夜晚或者光线不好情况下，打开“照明”档，可以轻松实现。

3) “闪烁”档：如果前方有行人，打开“闪烁”档可以引起行人注意避让；如果发生紧急情况，打开“闪烁”档还可以得到及时施救。

6、“通话”和“远程聆听”

1) 点击APP主界面的“拨打”按钮，即可直接拨打智能拐杖电话号码。当智能拐杖接收到来电，会语音播报来电的号码，只要按一下“SOS按键”接通即可进行通话。如果需要挂断电话，短按“电源键”挂断即可。

2) 点击APP主界面的“聆听”按钮，输入APP中已设置的任一SOS号码，点击确认即可下发指令。手机会接收来自手杖号码的回拨电话，接通后，即可实现远程聆听功能。

注：为了有效防止电话骚扰，手杖只能接听APP中设置的“SOS号码”和“亲情号码”。

7、“电子围栏”

点击APP主界面的“电子围栏”按钮，可添加或更改电子围栏。如果手杖使用者离开或进入电子围栏所指定的范围，则手杖会自动发出告警到APP的“消息中心”，从而实现实时监护。

8、可伸缩

根据使用者的身高来调节智能拐杖的长度，切记不要超过可调节的安全范围。

9、防滑

智能拐杖的拐尖外面还套有一个防滑头，因为经常使用的原因，防滑头记得勤换。

10、减震功能

智能拐杖一般都有4节主杆，并且是可伸缩，这样可以满足不同身高的人群使用。4节主杆中的其中一节就是带有减震设计，需要就拧开那一节，不需要则拧紧就可以了。