

# 一次性使用雾化器

产品名称	一次性使用雾化器
公司名称	新乡市友邦医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长垣县蒲东区S308省道与蒲城大道交叉口西北角
联系电话	18530235569 18530235569

## 产品详情

### 组成

雾化器由松紧带、铝卡、咬嘴或面罩、导管、雾化芯、药物杯组成；

咬嘴型雾化器由咬嘴、导管、雾化芯、药物杯组成；

面罩型雾化器由松紧带、铝卡、面罩、导管、雾化芯、药物杯组成；

手持型雾化器由手持咬嘴或面罩、导管、雾化芯、药物杯组成。

### 四、产品性能：

- 1、雾化器内径应无色透明或半透明，应能观察液体的液面。
- 2、每种规格每1mL应标有刻线，每2mL应标有刻线和数字，刻线及字迹应清晰。
- 3、上盖与药物杯旋合处密封应良好。
- 4、在流量8L/min条件下，雾化量 0.16mL/min。
- 5、各组件间的连接应牢固、可靠，在纵向承受15N静力时,持续30s，不应发生脱落松动现象。
- 6、应无菌。
- 7、环氧乙烷残留量应不大于10mg/kg。

### 五、适用范围：

在呼吸装置系统中，一端接入氧气，用氧气的压力将放置于雾化器中的药剂雾化，产生的雾化气体通过

雾化器的另一端吸入病人口中。

#### 六、禁忌症：

暂未发现。

#### 七、使用方法：

- 1、确认在灭菌有效期内撕开包装，取出雾化吸入器；
- 2、将雾化器与雾化器气源配套连接；
- 3、面罩置于患者面部与面部密合，并用松紧带固定。调节铝夹，使面罩避免药物进入眼睛。
- 4、旋下雾化盖，根据医嘱加入药液，然后装上雾化盖，向右旋紧。将雾化器插入面罩，用联接管接入气源。
- 5、用氧气作气源时，请检查湿化瓶是否漏气，以免造成气体不足引起雾化不良。
- 6、打开气源，调节气体流量至4L/min ~ 10 L/min(流量按医嘱)。必要时，轻拍雾化器直至开始雾化。
- 7、装药量不要超过药物杯规定的最大容量(见规格)，加药时，切勿将药液注入雾化器中心小孔内。
- 8、咬嘴型雾化器：患者嘴唇紧贴咬嘴。

#### 八、注意事项：

- 1、本产品经环氧乙烷灭菌，无菌有效期两年，产品过有效期后禁止使用；
- 2、包装破损禁止使用；
- 3、产品为一次性使用，用后销毁，严禁重复使用；
- 4、生产日期、失效日期见小包装；
- 5、如患者感到气闷，请卸去面罩；
- 6、遇冷、湿天气，在雾化治疗后不要立即走到室外，否则易患感冒。