

颈椎牵引器 便携式颈椎牵引器价格

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 颈椎牵引器 便携式颈椎牵引器价格 |
| 公司名称 | 衡水安佳医疗器械有限公司 |
| 价格 | 10.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:安佳 型号:不限 |
| 公司地址 | 魏屯镇于庄村108号 |
| 联系电话 | 0318-8960090 18832830980 |

产品详情

衡水安佳医疗器械有限公司主营产品自发热护肘：托玛琳自发热护肘，磁疗自发热护肘，理疗自发热护肘等。颈椎牵引器 便携式颈椎牵引器价格

全国包邮，当天发货

360°全方位颈椎防护牵引器

全绒面料、加厚内胆、单管充气

玫红色，灰色，紫罗兰，宝蓝色4色可选

产品说明：便携式颈椎牵引器体积小，重量轻（250克）牵引力大（0-80公斤），牵引行程长（1-20厘米），乳胶内胆，绒布面料，透气性好，保护皮肤，充气成形时符合人体生理曲度，以保护颈前敏感区不受压，调节牵引作用和固定作用时，使用者仍感舒适。此产品使用安全、方便、见效快。

产品信息

名称：颈椎牵引器

颜色：灰色、宝石蓝、玫红、紫色、彩棉

款号：均码

材质：内（乳胶型气囊）外（进口绒布）

适合人群：所有人（白领、公务员、教师、司机、司机）

产品功能

功效：颈椎病、腰椎间盘突出；

骨质增生、如组织变形外伤；

头晕、眩晕、记忆力减退。

安佳颈椎牵引器适宜人群：产品适用于有神经根型颈椎病，长时间工作、学习、或驾车造成的颈部疼痛等症状的人群。

安佳颈椎牵引器使用方法：

- 1.按正确方法戴好便携式颈椎牵引器，初用者可先照着镜子佩戴，调节颈围大小，固定前部上、中两个尼龙搭扣，以适合不同颈围的人使用。
- 2.充气球打气前请拧紧放气螺母。
- 3.用充气球打气直到患者感觉力度合适，症状减轻为止。
- 4.牵引固定治疗每天至少 2 - 3 次，每次至少30分钟左右。
- 5.使用后拧松放气螺母，缓慢放气。

安佳颈椎牵引器注意事项：

- 1.治疗时尽量使颈部放松，慢慢加气压，以增强牵引效果。
- 2.充气时应循序渐进，不要过猛，在做牵引治疗出现头晕等异常反应时，应徐徐放气，直到不应有的症状消失，再重新调整使用。
- 3.大力牵引前应做30分钟小牵引，牵引复位时应在医生指导下进行。
- 4.使用时避免气囊接触坚硬物体，牵引器表面有污迹时，可在充气后用软毛刷粘水清洗，不可水泡、用力揉搓或刷洗。
- 5.勿将该产品靠近高温高热。

三层炫彩颈椎牵引器，特别适用于颈椎不适人群

送礼就送健康

爱TA就送TA健康

（送父母、送领导、送恋人、送孩子、送长辈、送朋友）

颈椎牵引器，每天20分钟，给您一身轻松

颈椎牵引器，是利用充气牵拉原理拉伸矫正颈椎的新型颈椎保健器械，居家使用非常方便简单，治疗保健都适用。使用后即时就有轻松舒适的感觉。

颈椎牵引器 便携式颈椎牵引器价格-此文章由联宇网整理发布