

RJ-10多功能血液溶浆机（10袋装）

产品名称	RJ-10多功能血液溶浆机（10袋装）
公司名称	金坛市悦诚仪器厂
价格	3860.00/套
规格参数	品牌:金坛悦诚 型号:RJ-10 工作室尺寸:每袋100-200ml（mm）
公司地址	中国 江苏 金坛市 金坛市北环东路1号
联系电话	86-051982805822 13616135311

产品详情

品牌	金坛悦诚	型号	RJ-10
工作室尺寸	每袋100-200ml（mm）	温度范围	温控37 ±1（°C）
温度波动度	±0.5（°C）	温度均匀度	±0.1（%）
控温方式	数码显示温度，微电脑控温。	适用范围	医疗、卫生

rx-10多功能血液溶浆机产品简介：

针对医院血库需求，我厂特自行研制了新型多功能溶浆机，该机采用数码显示，电脑控温，可根据不同的需求，任意设定温度，水温差不大于±1°C，配套安装了自动摇摆系统，可自动调控频率，特别是融化血浆，融化和摆动同时进行，数分钟取出即可使用。减少了工序，为抢救病人节省了时间，方便了医务工作者，是血库理想的配套工具。

rx-10多功能血液溶浆机主要技术参数及特点：

1、温控37 ±1 2、温控精度±0.5 3、数码显示温度，微电脑控温。4、加热功率. 1000w5、解冻时间， 10min6、最大化浆量10袋（100-200ml）7、有不可移动不锈钢解冻篮10只8、设有自动双臂往返摇摆系统80次/分钟或自动调频。

rx-10多功能血液溶浆机注意事项：1.平时设定水温，可长期开机，用时将摆幅开关打开，设定频率，自动摇摆，用完关掉摇摆开关，节约用电，减少机械磨损。

2.使用前一定要将水加到水位线，切勿干烧，以保护加热管。随着开机时间的不断增长，水箱的水回逐渐蒸发，请随时检查水位（加水换水）。确保机器正常运转。

3.设定温度：按set键可设定或查看温度设定点。按一下set键管字符开始闪动，表示仪表进入设定状态，

按 \downarrow 键设定值增加，按 \leftarrow 或 \rightarrow 键数据会快速变动，再一次按set键仪表回到正常工作状态温度设定完毕，开始加热指示灯亮。

4.提前设置：按set键3秒仪表进入内层参数设定状态。第一个出现并闪动的参数为 t_{off} 即停止的提前量，提前量参数要慎重调整，为减少温度过冲，仪表控制加热输出时会提前截止加热，当温度下跌到提前量以下时又开始加热，在设定值与提前量范围内输出（继电器）是不会工作的，这样可减少继电器动作次数以延长继电器使用寿命。例：若设定值为50.0，提前量为0.5，仪表控制加热到49.5.0时继电器释放，温度下跌到50.0 -0.5 =49.5 时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少，提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按set键3秒仪表回到工作状态。（注意：提前设置是为防止加热停止后温冲过高而专门设置的，一般情况下不需要修改）。

5.误差的修正：在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按set键3秒进入仪表深层菜单，第一个出现并闪动的参数为e00即提前量，再按一次set键出现闪动的参数即误差修正参数，配合 \leftarrow 或 \rightarrow 键可修改此参数。误差的修正范围确的仪表修正至不正确。为-9.9 到+9.9，修正完后再按一下set键退出。仪表出厂时修正值为0.0。

血液溶浆机分为水溶性和气溶性两种，我厂主要生产水溶性血液溶浆机，其特点是溶浆速度快，溶浆温度均匀，运行速度平稳，具有超温声光报警同时切断加热功能。

金坛市悦诚仪器厂是一家专业集开发、生产、销售、服务为一体的科技型企业。工厂主要产品包括：培养箱、摇床、振荡器、水浴锅、低温槽、离心机、搅拌器、恒温水箱（槽）、电热板等数十个系列。更多价格优惠！定做非常规产品、请留言或致电查询！！欢迎来电来函、赴厂参观考查！生产厂家价格有优势！0519-82805822