

# RJ-12数显恒温多功能血液溶浆机

产品名称	RJ-12数显恒温多功能血液溶浆机
公司名称	金坛市悦诚仪器厂
价格	5280.00/套
规格参数	品牌:悦诚 型号:RJ-12 产品适用范围:针对医院血库血液溶浆
公司地址	中国 江苏 金坛市 金坛市北环东路1号
联系电话	86-051982805822 13616135311

## 产品详情

品牌	悦诚	型号	RJ-12
产品适用范围	针对医院血库血液溶浆		

我厂经多家医院血库需求，特自行研制了新型多功能溶浆机，该机采用数码显示，电脑控温，可根据不同的需求，任意设定温度，水温差不大于 $\pm 1$ ，配套安装了自动摇摆系统，可自动调控频率，特别是融化血浆，融化和摆动同时进行，数分钟取出即可使用。减少了工序，为抢救病人节省了时间，方便了医务工作者。是血库理想的配套工具。一、多功能血液溶浆机主要技术参数及特点：1：温控 $37 \pm 0.5$ （可调）2：温控精度 $\pm 0.5$  3：数码显示温度，微电脑控温。4：加热功率. 1000w5：解冻时间，10min6：最大化浆量:4-16袋（200-400ml）7：有不可移动不锈钢解冻篮8只8：设有自动双臂往返摇摆系统60次/分钟或自动调频。多功能血液溶浆机特点我厂经多家医院血库需求，特自行研制了新型多功能溶浆机，该机采用数码显示，电脑控温，可根据不同的需求，任意设定温度，水温差不大于 $\pm 1$ ，配套安装了自动摇摆系统，可自动调控频率，特别是融化血浆，融化和摆动同时进行，数分钟取出即可使用。减少了工序，为抢救病人节省了时间，方便了医务工作者。是血库理想的配套工具。

二、多功能血液溶浆机注意事项1、多功能溶浆机箱内未注水之前，切勿通电。使用过程中加热管绝对不能露出水面，否则加热管会烧毁或焊锡融化漏水、触电等。

2、水箱用水必须需蒸馏水，切勿用水井水、河水、泉水等硬水，以防加热管爆裂及影响恒温灵敏度。

3、放水前切记应将电源切断。

4、不使用时，应注意将温度调至最小值。

金坛市悦诚仪器厂是一家专业集开发、生产、销售、服务为一体的科技型企业。工厂主要产品包括：培养箱、摇床、振荡器、水浴锅、低温槽、离心机、搅拌器、恒温水箱（槽）、电热板等数十个系列。更多价格优惠！定做非常规产品、请留言或致电查询！！欢迎来电来函、赴厂参观考查！生产厂家价格有优势！0519-82805822

