

# 膝盖疼怎么办用自发热护膝效果好对护膝

产品名称	膝盖疼怎么办用自发热护膝效果好对护膝
公司名称	天津华瑞鑫纳米有限公司
价格	30.00/1
规格参数	品牌:益金康
公司地址	天津市河东区津塘路18号鼎泰大厦18楼
联系电话	022-58514833 13389996917

## 产品详情

近日，新研发了一款远红外托玛琳磁疗护膝，该护膝采用全新的透气防水材料，SBR复合面料，布料柔软舒适，加入了托玛琳远红外粒子，自身的发热功能，锁定温度，不在有寒气伤骨的感觉，受到体验者们的一致好评!

自发热护膝的发热原理：

自发热产品是通过托玛琳的超细技术，天津华瑞鑫对磁粉、铁、镁、锶、包药剂、热感环保树脂等材料进行了纳米复合技术，制成的一种热感应材料，在人体体温的刺激下，通过转移触媒的作用，热感应材料就能即时放出热量了，在热能的作用下，远红外产生的负离子就能渗透\*\*深处，分解过氧化脂质等\*\*物质并通过汗水和尿液排除体外，扩张血管，促进血液循环，活化\*\*，调节神经，产生穴经效应。

天津华瑞鑫纳米科技有限公司专业生产托玛琳自发热护腰、护膝、护颈、护踝、磁护腿等一系列自发热磁疗产品，支持OEM、ODM，联系人：柳姐，电话\微信：13389996917 QQ:1245071437

护膝使用方法：如需快速使用高温热灸功能，将护具的自发热部分用布沾水擦湿(冬季可用温水)，再紧紧贴于理疗部位，一般15-30分钟左右即可感觉到明显的热感。根据个人情况调节配带时间。如果使用后有灼热感觉，属正常情况，请暂时摘下，绝不损伤\*\*。

做为日常护理保健时，不沾水直接使用，虽然\*\*不会快速感到高热和针刺感，但并不影响远红外、磁疗

、磁灸等保健功效的正常发挥。

本产品可重复洗涤使用，清水5分钟以内刷洗，不影响产品功效。

护膝注意事项：

- 1.高热、出血倾向、温度感觉障碍及佩带部位\*\*破损者禁用。
- 2.急性软组织损伤，请24小时后使用。
- 3.\*\*装有\*\*起搏器者禁用，个别过敏体质者请在医生指导下使用。
- 4.如局部出现发红、灼热属于正常现象，产品取下后现象自然消失。
- 5.严禁浸入水中泡洗，可用清水轻轻擦拭。勿用洗洁剂、漂白剂洗涤。
- 6.孕妇及儿童不宜使用。