

电脑心肺复苏模拟人-上海学育科教

产品名称	电脑心肺复苏模拟人-上海学育科教
公司名称	上海学育科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:学育医学 型号:XY-CPR480 产地:上海
公司地址	上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄7号140室
联系电话	021-66250087 13918131012

产品详情

电脑心肺复苏模拟人XY-CPR480

该产品结合2016国际心肺复苏标准，产品功能全面升级。其核心模块儿包括模拟人、心肺复苏显示器，可进行心肺复苏的训练和考核，打印机和显示一体化。实现瞳孔变化、颈动脉搏动、气道开放等心肺复苏施救成攻的必要条件。适用于社会心肺复苏培训机构、医院、医学院、卫校等医疗单位进行心肺复苏培训的。

择执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准

主要功能：

模拟标准气道开放；

人工手位胸外按压时：条码指示灯显示按压强度、数码计数显示、语言提示；

- 1、动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域)由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由条码黄色、按压深度过深（大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。
- 2、数码计数显示；详细记录按压正确和错误的次数（按压力量过大、按压力量过小、按压位置错误的次数）。
- 3、语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。

人工口对口呼吸（吹气）时：条码指示灯显示潮气量、数码计数显示、语言提示：

- 1、动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确(500/600ml-1000ml)由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色 或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量大小；

- 2、数码计数显示：详细记录吹气正确和错误的次数（吹气量过大、吹气力量过小、及吹气错误的次数）。
- 3、语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的具体原因以便训练者及时改正。

按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）

操作周期：按压与人工吹气30：2五个循环周期CPR操作。

操作频率：最新国际标准：100次/分。

操作方式：训练操作；考核操作。

操作时间：以秒为单位计时。

语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

成绩打印：操作结果可热敏打印成绩单；

检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。

检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真是体现。

材料特点：

面皮肤、劲皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

标准套配置：

高级肤色全身人体模型一具；

高级电脑数码显示器一台；

豪华手拉推式人体硬塑箱一只；

复苏操作垫一条；

屏障面膜（50张/盒）一盒；

可换肺囊装置四套；

可换面皮一只；

热敏打印纸二卷；

2016国际最新操作指南光盘1盘；

现场急救常用技术使用手册1本；

使用说明书一本；

保修卡、合格证；