

带轮座折叠助行器

产品名称	带轮座折叠助行器
公司名称	衡水龙健医疗器械有限公司
价格	59.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡李家南田村
联系电话	0318-2100586 13785854763

产品详情

助行器的使用方法：展开：两手分别将撑管左右拉开，听到横杆弹销“咔嗒”一声弹出收缩横杆之处，方可使用。使用：双手握在手把上，两脚齐平，提起助行器，轻轻放在身体前一点，再支撑身体向前移动，，向前循序渐进，锻炼腿部肌肉，使其逐渐恢复行走功能。切记不可盲目操作，会适得其反。收合：用一手指按住横杆弹销，将撑管向内拉动，左右先后拉合拼齐，即可达到收合效果。高度调节：将一手指按住四角弹销，另一只手拉动底塞管，调节至适当的高度，同时将其它三只脚调到同一高度即可。组装：装有脚轮的撑脚装入撑管，直至听到弹销“咔嗒”一声弹出，方可使用。截瘫助行器除了能帮患者康复外，对患者的心理改变也是非常有好处的。几乎所有的截瘫患者都出现过自悲、放弃治疗的心理，不愿给家庭增加负担是他们的主要想法。而通过步行辅助器部分患者可以恢复和健康人同等对话的机会，这样大大增加了他们对治疗康复的信心。使用助行器一定要严格按照说明书，并且在专业人士的指导下操作，以免不当操作给患者造成不利的影响。

龙健视产品质量为生命，视售后服务为根本。买好产品到龙健医疗器械有限公司，让您用着放心：省心：舒心。