

骨必佳冷敷固定绷带冷敷敷料型骨科外固定绷

产品名称	骨必佳冷敷固定绷带冷敷敷料型骨科外固定绷
公司名称	重庆迈德医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市两江新区云竹路21号新能源智能产业园3号楼B区三楼
联系电话	023-68638578 18623132929

产品详情

产品概述

鉴于局部冷敷是国际公认的运动损伤急性期标准治疗措施之一，重庆迈德医疗创新研发了冷敷固定绷带，利用冷敷敷料的挥发性带走局部组织的热量，起到良好的降温缓释、消肿止痛、降低炎症、减少出血等作用。并配备冷敷敷料补充液，可再次使用、快速致冷，携带和使用都极为方便，是优质的居家、外出、旅游、运动的常备物品。

产品特点

功能强大实用性强

本品利用生物型冷敷敷料的挥发性来带走局部组织的热量，从而起到降温、消肿止痛的效果，并配备冷敷敷料补充液，可延长使用时间。

同时，作为冷敷敷料与绷带的结合体，可保持关节于受伤韧带松弛的位置，暂时限制肢体活动，有利于损伤韧带的修复，可缩短治疗和恢复时间。

使用方便 安全呵护

本品主要成分为亲水性高分子材料，透气性强，与huan处的接触面柔软，有弹性，舒适贴合，固定方便，避免传统冷敷时接触面不完全，固定困难的情况。

可根据不同部位所需长度行纵向裁剪，产品特殊的纺织工艺，确保裁剪后基本无线头和毛边。并无需戴手套操作，适用于运动损伤的应急处理，避免了传统冷敷的一系列准备工序和过冷刺激及冻伤的可能。

固定方法创新设计为自粘布粘贴固定，对受伤部位无任何损害。本品的x光透过性良好，亦可作为其他固定材料的衬垫层使用。

使用方法

- 1、打开外包装，以huan处为中心进行环形包扎后（包扎范围为受伤面积的1.5倍），用自粘布进行固定，可根据需要长度进行裁剪。
- 2、在绷带完全干燥后如仍需冷敷，可局部添加冷敷敷料补充液，不可使用日常用水代替。
- 3、包扎时不宜过紧，需经常观察huan处及周围组织血运是否良好，是否有过敏反应。如有不适，请立即停止使用。
- 4、可间歇使用，绷带弹性减弱时需更换。

注意事项

- 1、本品限用于无皮肤破损的密闭性红、肿、热和疼痛部位，避开眼、耳、口、鼻、黏膜、湿疹和瘙痒处。
- 2、本品仅供外用，使用时尽量将huan处抬高，以促进血液回流。请在医生指导下使用，如有不适，请立即停止使用，并去医院就诊。
- 3、可在2-8℃下冷藏，冷藏后效果更佳。打开后在特定温度及湿度下可保持挥发性8小时，开封后请立即使用，间歇性使用时，每次用好后请密封保存，未开封时请于避光阴凉处保存。
- 4、请勿放置于儿童易取处，孕妇及对本品过敏者慎用。

产品参数

产品名称：骨科外固定材料

商品名称：骨必佳

型号规格：冷敷敷料型（常用规格：7.5cm*360cm；10cm*360cm；尺寸或根据客户需求定制）

产品性能结构及组成：本品以薄荷、甘油、水和聚丙烯酸树脂等制成基质，由纯棉棉布、无纺布、弹力布、医用脱脂纱布、弹力无纺布与天然橡胶复合而成的材料制成。

适用范围：适用于固定和包扎骨折、脱位、软组织损伤等部位，可用于关节、肌腱、韧带等的一般性损伤的治疗和预防；还可用于缓解扭伤、摔伤、拉伤等造成的损伤部位的发热及疼痛等症状。

包装规格：200袋/箱

有效期：2年

贮存：密封，阴凉处、干燥处保存，避免阳光直射，冷藏后（勿冷冻）效果更佳。

生产企业：重庆迈德医疗器械有限公司

生产地址：重庆市两江新区翠云云竹路21号新能源智能产业园3号楼b区3楼

电话：023-67830829

销售合作：13617689349