

# 血糖仪 怡成血糖仪5D-2型 赠50条试纸

产品名称	血糖仪 怡成血糖仪5D-2型 赠50条试纸
公司名称	石家庄汇利通医疗器械有限公司
价格	168.00/件
规格参数	产品类别:家用血糖仪 品牌:怡成 型号:5D-2
公司地址	石家庄桥西区石铜路南环旺角7107号
联系电话	13323110603 13933859916

## 产品详情

产品类别	家用血糖仪	品牌	怡成
型号	5D-2	动力模式	电动
自动关闭功能	有	加印LOGO	不可以
是否提供加工定制	否		

【产品名称】北京怡成5秒血糖仪5d-2（送50片试纸+针头）

【特别推荐】北京怡成生物电子技术有限公司生产的jps系列血糖仪，于1994年就获得国家专利局颁发的专利证书，同年获得国家技术监督局颁发的新产品证书，该仪器经国家分析中心和北京市药品监督管理局的严格检测获得生产许可。积十年的研制、生产、产品的不断革新，怡成公司推出的怡成，该仪器采用虹吸测试条(独立包装)，采血量小，可记忆十次测试结果，操作简便，大屏幕，小体积，测试准确，外观人性化设计。

【功能简介】仪器外观设计精美时尚；试条采用虹吸技术；湾省采血量微少仅需0.5微升；5秒即可得到测试结果；可存储记忆10次测试数值；大屏幕全中文显示；使用纽扣长效电池；

【技术参数】仪器型号：怡成5秒血糖仪测试范围：2.2mmol/l~27.8mmol/l测试时间：5秒血液样本：末梢全血血样量：约0.5微升存贮器：10个测试结果工作温度：5~40 工作湿度：小于85%电源：2节g13纽扣电池电池寿命：约1000次外形尺寸：95mm×50mm×15mm重量：不大于50g

【包装附件】血糖仪一台、采血笔、携带包各一，操作使用手册、保修卡各一份赠送：5秒试条50条，配套针头50个。

【生产厂家】北京怡成生物电子技术有限公司生产怡成公司售后服务电话：8008100118

【操作方法】1、安装针头

将一次性采血针头安装在采血笔中，在盖笔帽的过程中，注意不要接触针尖部位避免扎伤手指。

图例演示：

## 2、清洁手指

用酒精或怡成专用皮肤消毒液消毒，并等待手指完全干燥，注意不能用碘酒消毒。

图例演示：

注意：消毒时用酒精棉球由内向外擦拭，避免棉球重复滚动而影响消毒效果。

## 3、校正校正码

启动仪器开关，仪器显示“888”自检程序，之后在屏幕下方显示“校正”并连续闪动6秒，提示核对仪器校正码是否和试条校正码一致，如果不同，在“校正”提示闪动6秒钟内，连续按动主按键进行调整，直到与试条所标识校正码相一致为止，调到相同校正码时停止按动，校正码自动记忆。

图例演示：

注意:如不小心错过所需校正码的位置，请继续按动，仪器校正码共31个，可循环操作。

## 4、插入试条

当仪器屏幕显示“插入”字符时，打开试条包装取出试纸，将试纸电极一端插入仪器插口。

图例演示：

注意：电极端平面与仪器屏幕为一个方向，插入时不要用力过大，以免折弯试条，检查插入是否到位，以屏幕是否显示“进血”字符为准。

## 5、采血

将采血笔稍用力垂直顶住所需采血的部位，按动弹钮使针头刺破皮肤。

图例演示：

## 6、加样

当仪器显示“进血”字符时，将血样靠住虹吸端口处（左、右均可，但不可同时加血），此时由于试条的虹吸原理，血样被自动吸入试条反应区内。

图例演示：

注意:血样需一次性充满反应区，不能反复加血，亦不能刮血。