

触电急救心肺复苏模拟人厂家 高级电脑心肺复苏模拟

产品名称	触电急救心肺复苏模拟人厂家 高级电脑心肺复苏模拟
公司名称	上海康为医疗科技发展有限公司
价格	7000.00/套
规格参数	品牌:康为医疗科技 型号:无
公司地址	浦东新区书院镇新欣东路25号3幢
联系电话	021-62767530 18964699739

产品详情

触电急救心肺复苏模拟人厂家 高级电脑心肺复苏模拟人厂家 该产品功能进行全面升级，突出CPR训练操作的辅助功能，以及可自行设定各项数值，更加符合临床和教学练习CPR操作要求。

执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）& 心血管急救（ECC）指南标准

功能特点：模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 模拟生命体征：

.初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。

.按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。

.抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。

可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。

三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 .方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。

.方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2010国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。 .方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率

、按压和吹气的比例。 控制器显示屏功能： 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。

人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。

语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。

条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml：.吹气量过少时，条形码为黄色。

.吹气量合适时，条形码为绿色。 .吹气量过大时，条形码为红色。

.吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；

条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm：.按压深度过少时，条形码为黄色。

.按压深度合适时，条形码为绿色。 .按压深度过大时，条形码为红色。

可自行设定操作时间，以秒为单位。 操作频率：2015标准为至少100次/分，也可自行设定数值。 电

源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情

况下直接使用。） 打印机功能： 操作结束后打印操作过程。 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断

、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作

中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹

气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹

性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、

形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

标准套配置： 高级复苏全身人体模型一具； 高级显示控制器一台；
豪华手拉推式人体硬塑箱一只； 复苏操作垫一条； 电源适配器一根； 数据线一根；
屏障面膜（50张/盒）一盒； 可换肺囊装置四套； 可换面皮一只； 热敏打印纸二卷；
2015国际最新操作指南光盘1盘； 急救手册1本； 使用说明书一本； 保修卡、合格证；
.康为医疗科技__触电急救心肺复苏模拟人厂家 高级电脑心肺复苏模拟人厂家