

供应低温等离子灭菌器铝合金内胆

产品名称	供应低温等离子灭菌器铝合金内胆
公司名称	河南省获嘉明星机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市获嘉县产业集聚区
联系电话	0373-4530022 15136725711

产品详情

低温等离子灭菌器的使用注意事项：

- 1、灭菌前，必须将所有器械彻底清洗和干燥，否则可能导致灭菌不彻底或灭菌程序被取消。
- 2、使用专用的灭菌器械盒，无纺布，灭菌袋。
- 3、医用无纺布建议重复使用次数不要超过2次。

包裹器械盒时，建议医用无纺布的包裹层数为2层，自含化学指示灭菌包装袋不能重复使用。

- 4、如灭菌程序未运行完成或被终止，必须将器械重新打包，并使用新化学指示条，化学指示胶贴和生物指示剂重新灭菌和培养。
- 5、对于之前一直采用化学浸泡和甲醛熏蒸方法消毒灭菌的器械，现使用本设备灭菌，请仔细检查器械的完好性，若有破损，请立即取出，不可采用本设备灭菌（因为破损的器械不能承受压力以致无法达到灭菌效果）
- 6、使用含氯等卤元素试剂清洗过的器械，经本设备灭菌后可能导致器械受损。
- 7、器械盒务必使用无纺布包裹后，方可放入菌舱内。严禁直接使用无纺布包裹手术器械进行灭菌。
- 8、装入灭菌器内的物品不可重放置，物品之间应保持一定间隙。