

豫北12cm一次性使用医用碘伏棉签

产品名称	豫北12cm一次性使用医用碘伏棉签
公司名称	河南省豫北卫材有限公司
价格	680.00/件
规格参数	品牌:豫北 型号:12cm 单件数量:60000支/件
公司地址	河南 长垣县 河南省蒲东工业园区
联系电话	15090305663 15090305663

产品详情

【公司简介】

河南省豫北卫材有限公司成立于（简称：豫北卫材， 欢迎来电咨询，电话：18737387539 QQ：2676219851 Email：hnyubeiweicai@163.com 地址：河南省新乡市长垣县蒲东工业区6号）1998年5月，是一家专业生产医疗器械和卫生材料的现代化企业。河南省豫北卫材有限公司位于河南省长垣蒲东工业园区，临308省道，交通十分便利，公司总占地面积40000平方米，并拥有10万级净化车间10000平方米。本公司固定资产5000万元，检测中心拥有完善的检测设备和过硬的检验技术。本公司固定资产5000万元，流动资产240万元，现有职工220人，中、高级技术及管理人员27人。

一次性使用医用碘伏棉签使用说明书

【产品名称】：医用碘伏棉签

【规格型号】：8cm、10cm、12cm、15cm、18cm、20cm、25cm

【产品标准编号】：YZB/豫0659-2014《医用棉签》

【注册证编号】：豫械注准20152640262

【生产许可证编号】：豫食药监械生产许20150112号

【结构组成】：本产品由医用脱脂棉和竹(木)棒捻合而成。

【产品性能】：1、棉签的竹棒应光滑、无毛刺;棉头应洁净、无杂质，成形大小要均匀;

2、结合牢固度 棉签头与棒应结合牢固，棉头尾部与竹棒要捻紧，头部要膨松，不得自然脱落。在施加2.5N的轴向静拉力，持续10S作用下，棉头与棒不得分离。

3、棉签头性能

3.1白度:剥离棉签头的医用脱脂棉,其白度应不低于60度。

3.2水中可溶物:剥离棉签头的医用脱脂棉制成供试液,在100ml供试液中遗留残渣应小于0.5%。

3.3酸碱度:剥离棉签头的医用脱脂棉制成供试液,在100ml供试液中加酚酞指示剂不得显粉红色,加溴甲酚紫指示剂不得显黄色。

3.4 易氧化物:剥离棉签头的医用脱脂棉制成供试液,在10ml供试液中加0.1%高锰酸钾溶液10滴,5min内红色不得完全消失。

3.5吸水时间:剥离棉签头的医用脱脂棉应于10s内沉于液面以下。

3.6 吸水量:剥离棉签头的医用脱脂棉,每克试样的吸水量应不少于10g。

3.7醚中可溶物:剥离棉签头的医用脱脂棉制成供试液,每100ml供试液中遗留残渣应小于0.5%。

3.8干燥失重:剥离棉签头的医用脱脂棉称取2g干燥至恒重,减失质量不得大于8.0%。

3.9炽灼残渣:剥离棉签头的医用脱脂棉称取2g干燥至恒重,供试液中的遗留残渣不得大于0.5%。

3.10表面活性物质:供试液中表面活性物质泡沫不得超过2mm。

4、棉签应无菌。

5、棉签经环氧乙烷灭菌,环氧乙烷残留量应不大于10mg/kg。

【适用范围】:临床用于蘸取消毒液后,对完整皮肤消毒使用。

【生产日期】:见合格证或包装封口处。

【生产批号】:见合格证或包装封口处。

【失效日期】:见合格证或包装封口处。

【配置清单】:暂无。

【注意事项】:1、本品经环氧乙烷灭菌,无菌有效期两年;

2、包装破损禁止使用;

3、本品为一次性使用,用后销毁;

【贮存】:贮存在相对湿度不超过80%,干燥通风、清洁、无腐蚀性气体的库房内。

【禁忌症】:暂无

【注册人名称】:河南省豫北卫材有限公司

【售后服务单位】:河南省豫北卫材有限公司

【生产企业名称】：河南省豫北卫材有限公司

【住 所】：长垣县蒲东工业园区

【联系方式】：18737387539

【联系方式】：0373-8820388

【传真方式】：0373-8820388

【QQ方式】：2676219851

【Email】：hnyubeiweicai@163.com