

# 竹制6孔艾灸盒、温灸盒、艾灸器、温灸器

产品名称	竹制6孔艾灸盒、温灸盒、艾灸器、温灸器
公司名称	中宇爱斯柯(益阳)科技实业有限公司
价格	14.00/个
规格参数	品牌:yyaisike 部位:腰部 产地:湖南益阳
公司地址	中国 湖南 益阳市 长春工业园马良北路366号
联系电话	86 0737 3801478 15073734516

## 产品详情

品牌	yyaisike	部位	腰部
产地	湖南益阳	箱装数量	50
贸易属性	内贸		

我公司现在生产各种规格竹制艾灸盒，价格优惠，质量优良，欢迎订购。每套包含松紧带，硬纸板包装盒，金属环，金属挂钩。

装箱规格：

品名	规格	单个净重	装箱数量	净重	毛重
艾灸盒	单孔	0.165kg	5*7*5=175个	29kg	31kg
艾灸盒	双孔	0.23kg	(3*7+4)*5=125个	27kg	29kg
艾灸盒	三孔	0.273kg	(2*7+3)*5=85个	23kg	25kg
艾灸盒	长四孔	0.368kg	2*7*5=70个	25.8kg	28kg
艾灸盒	方四孔	0.31kg	3*5*5=75个	23.3kg	25kg
艾灸盒	六孔	0.375kg	2*5*5=50个	18.75kg	20.5kg

竹制单孔灸盒使用说明：

- 1、顶管：适用于粗细不同的艾条,调整就和顶盖上的夹子即可。
- 2、盒架：是灸架的主体，盒盖与灸盒可分开,既便于清除灰烬又利于通风燃烧。
- 3、防护网：位于底部，是为了防止艾火脱落烫伤皮肤所设的隔离层。
- 4、底袪：用以勾住橡皮带，将艾灸架固定在灸处用。位于架子底部两侧。

5、橡皮带：套住底衬，固定支架用。

6、盒体与盒盖由2个小磁铁固定,方便盒体与盒盖可分开

使用说明：

1、将艾条点燃后插入顶管，以上下自由移动为准。

2、选好熏灸部位，然后将灸盒罩在上面，将橡皮带套在灸架两边的底衬上，即可附贴牢固而不脱落。

3、升降艾条调节火力，以微烫而不疼痛为适中，火力过小，效果不佳。

4、经常吹去或弹掉艾条上的灰烬，并保持艾灸架的清洁。

5.灸完后,将顶盖打开,将灰烬倒掉.

禁忌:1.大醉大怒大惊大恐过劳过饱情形下禁灸.

2.皮肤过敏者不宜灸.注意事项:施灸时,认真操作,防止灼伤皮肤,孕妇施灸遵医嘱.