

电脑心脏复苏模拟人（液晶显示屏）

产品名称	电脑心脏复苏模拟人（液晶显示屏）
公司名称	上海知能医学模型设备制造有限公司
价格	9000.00/件
规格参数	品牌:医博 型号:BIX/CPR580 价格:9000
公司地址	松江区昆港公路1268号
联系电话	021-63818866 18116401121

产品详情

知能医学模型电脑心脏复苏模拟人（液晶显示屏）

知能医学模型所供应的这款电脑心脏复苏模拟人（液晶显示屏）产品是经国内心肺复苏模拟人领域权威专家建议指导，集国外同类产品之长处及公司科技人员的共同努力，率先开发的专门针对社会心肺复苏普及与医学院校、医疗卫生系统培训使用的心肺复苏急救模拟人新产品，其造型更完美、功能更强大、操作更方便的心肺复苏模拟人产品。功能介绍：

液晶彩显:人工呼吸与胸外按压、模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示。 模拟标准气道开放；

人工手位胸外按压时：1、动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域)由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由条码黄色、按压深度过深(大于6cm)由条码红色指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。2、液晶计数显示；详细记录按压错误的各种原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数）。

3、语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的各种原因，以便训练者及时改正。

人工口对口呼吸(吹气)时：1、动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml~600ml-1000ml）由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度；

2、计数显示：详细记录吹气错误的各种原因（按吹气量过大、吹气力量过小、及吹气正确的次数）

3、语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的各种原因，以便训练者及时改正。

按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人） 操作周期：有效30次按压及2次人工吹气，

30：2五个循环周期CPR操作。 操作频率：2015国际标准：至少100~120次/分。

操作方式：训练操作；考核操作(普及考核、自定义考核)。 操作时间：以秒为单位计时。

语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

成绩打印：操作结果可热敏打印长条和短条成绩单 检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压

操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。标准配置：心肺复苏全身人体模型1具；

电脑液晶显示器1台； 豪华手拉推式人体硬塑箱1只； 心肺复苏操作垫1条；
心肺复苏屏障面膜(50张/盒)1盒； 可换肺囊装置4套； 可换面皮1只；
心肺复苏操作成绩热敏打印纸2卷； 2015国际新版心肺复苏操作指南光盘1盘；
心肺复苏现场急救常用技术使用手册1本； 使用说明书1本； 保修卡、合格证1套；

产品实拍：

相关产品：[心肺复苏模拟人（计算机控制）](#) [大屏彩显电脑心肺复苏模拟人](#)
[电脑心肺复苏模拟人液晶彩显](#) [全自动电脑心肺复苏模拟人](#) [电脑心肺复苏模拟人](#)
[全自动电脑心肺复苏模拟人](#)

友情

提示：如

果以上产品不符合

您的需求，专业的产品经理根据您的具体需求针对性推荐适合您的[心肺复苏模拟人](#)产品。