

YXH-1A1铝合金折叠担架

产品名称	YXH-1A1铝合金折叠担架
公司名称	张家港市协和医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市杨舍镇闸上村新闻中路7号
联系电话	0512-58197198

产品详情

YXH-1A1铝合金折叠担架使用说明书

注册标准：YZB/苏(苏) 0008-2006

注册号：苏苏食药监械(准)字2006第1560016号

一、技术参数：

1、尺寸（长×宽×高）：展开时：185×50×20cm

折叠时：92.5×50×9cm

2、净重：6kg

3、承重：159kg

二、使用方法：

1、打开：将担架面打开，按下脚轮及撑脚上的定位按钮，将脚轮或撑脚向外拉出于担架面90°位置。

2、折叠：按上述动作相反进行。

三、适用范围：

本担架采用高强度铝合金和牛津革担架面制成，具有重量轻、体积小、携带方便、使用安全等优点，主

要适用医院、体育场地、救护车及部队战地运送伤员。

四、注意事项：

- 1、担架打开后，应确保脚轮及撑脚上的定位按钮弹出插入定位槽。
- 2、担架面如有破损应及时更换。
- 3、必要时应使用保险带保险。

五、维护保养：

- 1、经常保持整洁（包括消毒）。
- 2、经常检查是否有部件松动现象。

六、贮存及运输：

- 1、本担架应在防潮、无腐蚀的环境下贮存。
- 2、可用一般运输工具运输。

七、包装及附件：

- 1、本担架用纸箱整机包装。
- 2、附件：合格证、说明书。

联系方式：0512-58580083 www.dan-jia.com