

电脑心肺复苏模拟人（液晶彩色显示屏）

产品名称	电脑心肺复苏模拟人（液晶彩色显示屏）
公司名称	上海知能医学模型设备制造有限公司
价格	8800.00/件
规格参数	品牌:知能 型号:CPR590 价格:5000
公司地址	松江区昆港公路1268号
联系电话	021-63818866 18116401121

产品详情

知能医学模型电脑心肺复苏模拟人（液晶彩色显示屏）

执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）& 心血管急救（ECC）指南标准；功能特点：3.5英寸液晶屏显示，模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

模拟生命体征：.初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。

.按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。

.抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。.瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。

可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。

三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 .方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。

.方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。 .方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率

、按压和吹气的比例。控制器显示屏功能： 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。

语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。

文字提示：训练和考核中全程中文文字提示。

条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml：.吹气量过少时，条形码为黄色。

.吹气量合适时，条形码为绿色。 .吹气量过大时，条形码为红色。

.吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；

条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm：.按压深度过少时，条形码为黄色。

.按压深度合适时，条形码为绿色。 .按压深度过大时，条形码为红色。

可自行设定操作时间，以秒为单位。 操作频率：100~120次/分。 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。）打印功能：

操作结束后打印操作过程。 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。材料特点： 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。标准配置：

心肺复苏急救全身人体模拟人1具； 显示控制器1台； 豪华手拉推式人体硬塑箱1只；

心肺复苏急救操作垫1条； 电源适配器1根； 数据线1根； 屏障面膜（50张/盒）1盒；

可换肺囊装置4套； 可换面皮1只； 心肺复苏急救操作成绩热敏打印纸2卷；

2015国际新版心肺复苏操作指南光盘1盘； 心肺复苏急救操作手册1本； 产品使用说明书1本；

保修卡、合格证1套；选配件：RF遥控器 RF遥控器,老师可通过遥控器控制CPR 开始，停止，瞳孔变化，有无脉搏，打印机等功能还可以意识判断，急救呼叫，脉搏检查，检查呼吸，清楚异物进行记录。

产品实拍：

相关产品：[液晶彩色大屏幕全自动心肺复苏模拟人](#) [全自动电脑心肺复苏模拟人](#) [电脑心肺复苏模拟人](#) [全自动电脑心肺复苏模拟人](#) [半身心肺复苏模拟人](#) [半身心肺复苏模拟人](#)

友情

提示：如

果以上产品不符合

您的需求，专业的产品经理根据您的具体需求针对性推荐适合您的[心肺复苏模拟人](#)产品。