

红宝石精子计数板(MACRO)

产品名称	红宝石精子计数板(MACRO)
公司名称	上海微图仪器科技发展有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	品牌:微图
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新四平公路468弄14幢17号(注册地址)
联系电话	021-51602884 15021118283

产品详情

一. 用途

MACRO精子计数板是精液自动分析系统必备的重要检测配件致胎,主要用于精子计数及形态分析,以及前列腺液、宫颈分泌液、血球细胞计量检验等

本公司精子计数板由医学专家和我公司光学领域设计专家静心研制,在行业内畅销了近20年,在世界上多个国家均有销售,开发设计严格遵照WHO的相关要求,借鉴国际领先并加以创新改进,更加符合临床使用。计数板在上盖与测量区之间的距离只有10um深,精液标本放入以后,只允许精子做二维平面运动,不允许精子做垂直方向运动,保证了在临床检验时做到单层取样,确保检测结果的准确。

为保证完美品质,产品一直沿袭小规模手工制作,每块计数板都要经过先进的仪器检测,严格控制误差,再使用精液标本测试,两项测试通过才能销售。

二. 使用方法

- 1) 基座板上 6.5mm处为体液载放台,使用医用酒精消毒后,即可使用
- 2) 将被检精液滴于圆形载液台上,盖上环形盖板,置于显微镜平台上即可观察计数
- 3) 在显微镜上接入数字摄像头与电脑连接,即可应用分析软件进行计数或形态分析
- 4) 可配套我公司生产的WT-2000C型精液分析专用恒温台来保持恒温观察.

三. 技术参数

- 1) 外形尺寸: 74 × 36 × 7 (板加盖总厚度), 单位: mm
- 2) 载液平台: 6.5mm 与盖板之间的间隙 0.01mm 精度误差: 在37度恒温状态下为+1.5um

3) 网格尺寸：0.1 × 0.1=0.01mm/小格

四．注意事项

1) 本产品为高级精密检验工具，主体为高级光学玻璃，红宝石组合制品，轻拿轻放，不能碰撞。2017年最新款采用金属基板和金属盖圈，不仅外观高端，而且更耐磨也防碎，使用维护更长久

2) 不能用硬物在圆形载液台上擦拭

3) 禁止用40度以上热水冲洗浸泡，严禁用强酸，强碱液擦洗

4) 使用完毕，请用医用酒精清洗后放入专用盒内

5) 本计数板的质量档案在本公司都有资料可查，一板一编号一档案

注：与WT-2000C型高精度生物显微加热器配套使用