

# 考拉暖身贴 大号考拉暖身贴

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 考拉暖身贴 大号考拉暖身贴                                      |
| 公司名称 | 北京方拓工贸有限公司   |
| 价格   | 1.00/片   |
| 规格参数 | 品牌:大号考拉暖身贴<br>产品成分:铁、石、活性炭、无机盐、水<br>产品尺寸:133*100mm |
| 公司地址 | 北京市平谷区马坊镇打铁庄北二巷16号                                 |
| 联系电话 | 010-60995213 13910662218                           |

## 产品详情

|      |           |      |               |
|------|-----------|------|---------------|
| 品牌   | 大号考拉暖身贴   | 产品成分 | 铁、石、活性炭、无机盐、水 |
| 产品尺寸 | 133*100mm | 包装规格 | 300片          |
| 最高温度 | 65        | 平均温度 | 53            |
| 保温时间 | 12小时      | 保质期  | 3年            |
| 箱装数量 | 300       | 贸易属性 | 批发            |
| 产品类别 | 保暖贴       |      |               |

产品尺寸：130\*100mm 发热时间：12小时左右

平均温度：53 最高温度：65

产品材质：该品为片状贴剂，是由原料层、明胶层、无纺布袋三部分组成的，原料层置于无纺布袋内，明胶层用于使暖贴粘附在衣服上。原料层是由铁、石、活性炭、无机盐、水等合成的聚合物，可在空气中氧气的作用下发生放热反应。无纺布袋的特点是均匀不漏、透气性好。明胶层选用日本特有的优质压敏胶涂层，粘结牢固，绝不污损衣物。

适用范围1、用于风湿、关节炎、痤疮、劳损引起的疼痛、麻木、肿胀。2、用于受寒引起的胃肠病、腹泻、腹痛等。3、妇女痛经、产后收腹。4、外伤恢复期理血散瘀。5、滑雪、钓鱼、打猎、郊游、野外作业时取暖。6、房间内低温时取暖。7、按摩的热敷等。

## 注意事项

- 1、使用时要贴于内衣的外侧，不要直接贴于人体皮肤上。
- 2、请注意低温烫伤，就寝时请不要使用，在被窝中使用或与取暖设备并用时，会使温度升高，请勿使用。
- 3、糖尿病、孕妇和血液循环障碍者，皮肤热敏感度低者，请在使用时注意。
- 4、小孩，高龄者，不能自理者应在特别看护下使用。
- 5、若包装内容物不慎接触到眼睛要立即用清水冲洗并就医。识食后要立即催吐并就医。
- 6、请避免在同一位置长时间使用，并注意确认皮肤状况，如有异常立即取下。
- 7.远离孩童，暖贴不宜直接贴于皮肤上使用，不可使用破烂暖贴。

## 保存方法

未使用之暖贴必须保存于原包装内，置于干燥、避光处保存。放在幼儿不易拿到的地方。

这个除了自己用还可以送父母、送孩子、送姐妹、送兄弟、送同事.....男女老少都适宜，很划算的哦！！

在凛冽的寒冬，你想让你的爱人在冬日里美丽不冻人吗？冬季里你想让孩子在滴水成冰的寒冬上学不再受冻吗？在白雪皑皑的季节,父母也怕寒冷,你想送温暖表爱心吗？寒冷的冬季里，gg可以送给心爱的mm们，这样mm的这个冬天就不冷了，圣诞元旦等节日逛街的时候放一片在口袋里，从手心暖暖到心田，没有你牵的一只手也同样温暖如春，mm肯定会因为你的细致关怀而感动不已！！有小孩上学的也可以用哦，贴在膝盖上或者放在口袋里，上课再也不会因为冷而不能集中精力听课了！！家里有老年人的也可以用的，冬天老年人最怕冷，孝顺的你买一些送给老年人，老人肯定喜欢而且觉得贴心实用，贴在腰上或者膝盖上再也不会觉得冷！！其实这个对老年人来说是四季常备用品的呀！！经常骑车的人也可以用的，冬天寒风很大，骑车的时候贴一片在膝盖上，不仅保暖而且有效预防风湿减轻疼痛！！喜欢钓鱼等户外活动的朋友们，也可以贴在身上保暖驱寒的，嘿嘿~~结婚的新娘子，冬天里贴上一片真是就有结婚的风光喜庆，又保持身体暖暖的，有活力而且还不会感冒哦，很灵的哦~~

不喜欢穿太多笨拙衣服的时尚mm，可以贴片保暖哦，永远站在最时尚流行前沿哦~