

肺活量电子测试仪-肺活量测试仪厂家

产品名称	肺活量电子测试仪-肺活量测试仪厂家
公司名称	常州继豪电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省常州市武进区湖塘城西工业园定安中路60号
联系电话	13616111477 13606142534

产品详情

关于触摸屏的简易使用说明

- 1.在刚开机的初始界面下，轻触屏幕中央位置进入输入学号界面
- 2.再轻触【（1）学号：】的冒号右侧即弹出输入学号小键盘
- 3.轻触小键盘上的【EN】切换英文大小写和数字输入模式
- 4.从屏幕最上方快速下拉进入设置界面，可进行各种设置，从屏幕最下方快速上拉退出设置界面。

1：自动测量人体一次呼吸的最大气体通量；

2：肺活量计自带显示屏，可单独使用；设有防换气作弊功能；

3：主机与外设无线连接，可扩充至16人同时测试，内置锂电池可连续工作8小时以上；

4：主机双芯片存储备份数据，存储量可达6万-10万条；主机中英文7寸彩色触摸屏显示操作界面，背光亮度可调节，全程语音提示（可调节音量），可选配增加VGA接口功能，可连接17-55寸大显示屏同步显示学生的测试成绩和姓名学号；

5：主机预留USB接口，可直接连电脑下载1万-2万条名单，同步显示姓名、编号、性别等详细测试信息，还可选配用身份读取测试者的身份信息，支持1-30位数字、英文学号输入；

6：主机同时具有英文、数字（有自动递增功能）、智能IC卡、ID卡、激光条码扫描枪等多种身份信息输入的功能；

7：主机与电脑之间采用2.4G无线传输，传输距离可达100米以上，多台主机可同时集中上传数据至电脑

评分软件内；

8：主机同时具有查询、删除、一键恢复数据、一键初始化等强大功能；

9：主机兼容多种测试项目，不同的测试项目主机可相互替换进行测试，兼容互通，确保测试的稳定性；

简易测试方法：开机后按下【Enter】键进入输入测试者编号界面，可选用手动键盘、智能IC卡、条码扫描三种方式输入测试者编号；测试者编号输入完成，按【Enter】键开始测试，受测者将吹嘴插入吹筒的进气口，手持吹筒，深吸气后嘴巴对准吹嘴，以中等速度吹气，直至不能吹出气体为止；测试仪发出“滴滴”两声，第一次测试结束，自动进行第二次、第三次测试（最多可连续测试3次），按【Enter】键保存最好成绩

技术参数：

测量范围：100mL ~ 9999mL 电源：DC12V1A（由电源适配器提供）

测量分度值：1mL 工作环境：5 ~ 40 湿度 < 90%

误差：±2.5% 存储环境：-10 ~ 50 湿度 < 75%

肺活量电子测试仪，肺活量测试仪，学生体质健康测试仪http://www.jsjihaodz.com/h-pd-64-0_304_8_-1.html?pfcc=%257B%2522groupIds%2522%253A%255B8%255D%252C%2522mul%2522%253Atrue%252C%2522lid%2522%253A1%252C%2522sc%2522%253A%257B%2522key%2522%253A%2522name%2522%252C%2522desc%2522%253Afalse%257D%257D