

导乐球架厂家批发包邮导乐工具厂家

产品名称	导乐球架厂家批发包邮导乐工具厂家
公司名称	湖南中伦精密科技有限公司
价格	4219.00/个
规格参数	高度:100 长度:55 质量:1.1千克
公司地址	湖南省长沙市岳麓区望月湖街道望月湖9片1栋102房
联系电话	18273146314 18273146314

产品详情

孕妇分娩球 导乐分娩球 医用分娩球生产厂家长沙中伦品牌

中伦品牌 孕妇分娩球 导乐分娩球 医用分娩球生产厂家 导乐助产分娩球带架

随着我国医疗水平的提高及国家二胎政策的放开，越来越多的适龄妇女面临着分娩问题，同时，导乐分娩及无痛分娩越来越成为人们追求的方式，但是分娩者面临分娩的时候，由于新型的分娩支持工具相对短缺，同时助产士的短缺及相关培训不足导致助产士处理第二产程方式不合适，助产士应该耐心的等待胎儿自由降落，而不是一味的鼓励产妇用力，更好的办法是指导产妇调匀呼吸，不停转换的产妇无意识的推力变成集中的、持续的压力，使得膈肌对子宫产生压力，迫使胎儿下降，这就客观上要求一种能够提供“正确坐姿”的分娩工具。

传统的坐式分娩工具一般不能使得分娩者胳膊和脚大多数关节都处于放松的状态，寻求一种充分利用重心引力的辅助工具进行分娩，并且节约分娩者的力气。

0导乐球是什么？

湖南中伦品牌的导乐球不是瑜伽球，导乐球是加厚放突然爆破的分娩球，不是运动用的瑜伽球。请看清湖南中伦品牌导乐分娩球。

1 孕妇分娩球有啥作用？

导乐分娩球可以帮助解决这些问题的：它可以使婴儿处于开始和继续分娩的良好位置，并且可以使妈妈在分娩时自由活动。分娩过程中的自由活动是一名分娩中的孕妈妈可以帮助其婴儿降入产道的方法之一。妈妈本能地对她和婴儿有帮助的方式移动。但是运动可能会很累，因此分娩球可以在妈妈继续移动和摇摆的同时帮助她缓解疲劳加速产程。

导乐分娩球怎么使用？

2 导乐球怎样使用？

不要使把球充气到饱满。您希望它有一点柔软，因为这使它更加舒适：

(1) 脚平放在地板上，坐在球上，并分开，与出生球形成三脚架。

(2) 向后滚动肩膀，并稍微拉低您的下腹部（而不仅仅是让它垂下来）。

(3) 您可以尝试做一些小的臀围来伸展骨盆。

或者，您可以使用球来帮助您练习下蹲（打开骨盆并平衡身体的好方法）。

(4) 将出生球靠在墙上作为支撑。提起球，使其靠在中背部。

(5) 然后在蹲下时将球上下滚动。这在没有助产士或者其他人提供帮助的情况下非常有用。

3 导乐球尺寸规格？

(1) 性能:安全防爆;

(2) 材质PVC, 加厚度2.0-2.4 mm;

(3) 颜色:暖色(粉红色)

(4) 型号：小号(身高158cm以下)；中号(身高155-168使用)；大号(身高165cm以上使用)

(5) 可配不锈钢分娩架(安全架)

(6) 使用场所：产房医用

(7) 品牌：湖南中伦

(8) 产地：长沙市

(9) 存储：阴凉

4导乐分娩球/助产球配置清单

(1) 球塞

(2) 气筒

(3) 气针

(4) 气拔

(5) 说明书

(6) 合格证

5使用导乐球产妇身体有哪些禁忌：

(1) 母亲因素：高血压、癫痫症、心脏病等

(2) 妊娠并发症：前置胎盘、胎盘早剥、多胎妊娠、早产、不稳定的胎位

(3) 胎儿因素：胎心异常、羊水污染

(4) 硬膜外镇痛分娩情况下不能使用

(5) 非正常自然分娩情况下请遵医嘱

6导乐球生产厂家

湖南中伦精密科技有限公司，全国导乐分娩产品****，早在2013年就开始导乐分娩产品全国销售，老牌企业，请认准湖南中伦品牌，质量可靠，服务无止境，主营导乐球架，导乐椅，导乐垫，产妇导乐分娩车、悬挂分娩座椅组合、分娩台架，分娩花生球、花生分娩球架凳。