

多功能清创仪—超声波清创仪—超声清创

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 多功能清创仪—超声波清创仪—超声清创 |
| 公司名称 | 河南煜博生物科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 超声频率:20KHz-45KHz 冲洗管路:管路外置 定时:具有定时功能 |
| 公司地址 | 河南省郑州市金水区花园路126号正弘城丽汀公寓13层1311号(注册地址) |
| 联系电话 | 18530855281 18530855281 |

产品详情

多功能清创仪—超声波清创仪—超声清创它是集超声清创、高压冲洗于一体的多功能清创系统。利用高压冲洗快速清除创面异物，通过超声清创的“空化”效应，有效去除坏死组织，杀灭细菌，达到清创的目的。一方面进行了清创，减少伤口异物残留，在很大程度上降低患者二期激光异物引起的色素沉着概率，减轻患者痛苦，同时降低费用；另一方面保护了正常组织，减少了创口大小，有助于创口的愈合从而增加了安全性，降低了清创手术的难度。产品介绍：慢性伤口、难愈合伤口或已被坏疽感染的伤口往往在常规的同时还要进行反复的清创。常规的低压冲洗和碘酒擦拭容易存在“死角”（特别是创面情况较复杂或感染较深时），容易导致清创不伤口愈合缓慢。如采用锐器或手术清创总不可避免的会损伤创面边缘的新生肉芽组织并给患者带来疼痛。UAW在发达国家已经是一种被公认的安全有效的清创程序。

对于慢性难愈合伤口，采用UAW不仅可以有效的去除生物膜和坏死组织，而且可以限度的保护健康组织缩短愈合时间。原理：1、超声波是指振动频率大于20KHz以上的、超出了人耳接受范围的声波。

2、当超声波在介质中传播时，产生一系列的效应：（1）超声波的空化效应：当超声波作用于冲洗液时可以产生许多微气泡，这些微气泡随着超声振动做强烈的膨胀和收缩，气泡崩溃时产生微射流，形成冲击力，从而使伤口中的细菌、异物等被清除，同时使坏死组织脱离并清除。

（2）超声波的机械效应：促成液体的乳化、凝胶的液化和固体的分散；（3）超声波的温热效应：可促使发生或加速某些化学反应，如刺激成纤维细胞溶酶活性、增加蛋白质合成、引起前炎症介质及生长因子的释放等。产品优势：独家数字控温技术适合不同温度要求的伤口

负压吸引技术可自动吸收废液,溢出自动停止

高压脉冲冲洗技术扇形水流.冲击力强,适合大面积急救清创 造型优雅，可触摸彩色屏幕 临床应用适用于各种伤口 慢性伤口：糖尿病足 各种溃疡（如神经性、缺血性、性溃疡等） 褥疮 窦道、瘘道 坏死性筋膜炎 急性伤口：意外创伤（如犬咬伤、伤、擦伤） 感染伤口 烧伤 手术伤口 整形整容伤口 超声清创的显著优势：快速、安全、清创效率高。

破坏并去除生物膜和细菌。 去除失活组织。 不损伤新生健康组织。 与常规清创相比疼痛感低。

有助于创建干净的伤口床。 促进生长因子的释放，加速愈合。

操作简单，医生和护士均可使用。 MUI多功能超声清创机优势：

研发早：腾跃是国内较早开始研究超声清创技术的企业之一（曾与三军医大学野战外科研究合作）。

功能全：同时具有超声清创、数字控温、负压吸引、高压脉冲、图文数字工作站等功能（专利：2015208

06869.5、201520806817.8)。其中数字控温和图文工作站为功能。首
创同冲同吸式手柄，一个动作即可实现清创与废液回收。在降低污染的同时了清创效率。
水电分离式可拆卸手柄（专利：201520806816.3、201520804987.2
）。清创刀头可与手柄分离后进行处理，手柄的使用效率。
手柄前端配有可拆卸的防溅罩，增强了对操作者的保护。
清创刀头采用T钛合金制成，并通过了生物相容性试验（有检测报告）。
超声清创频率为40KHz，比25KHz的杀菌能力更强。