

# 泰州朵朵科技不锈钢医用高压水枪dd-011

产品名称	泰州朵朵科技不锈钢医用高压水枪dd-011
公司名称	泰州朵朵科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	朵朵:1 dd-11:1 泰州:1
公司地址	泰州市医药高新技术产业开发区鼓楼南路99号华润国际花园10幢2705号
联系电话	18136289832

## 产品详情

### 一、用途：

用于各类软性、硬性内窥镜、手术器械的冲洗，配备八个多功能冲洗喷头，方便医院内窥镜、供应室等各科室的使用。

### 二、特点：

专业：八个多功能喷头，可对不同品牌内窥镜腔道进行更细致的冲洗

方便：工作喷嘴可快速、自由更换

快捷：快换接头使更换连接头、工作喷嘴更加快捷，提高工作效率

安全：专为医用内窥镜、各类手术器械量身设计

### 三、使用方法：

将高压水枪的连接管接于水管的出水处，打开阀门即可进行高压冲洗或喷洒。针对不同的内窥镜管道、手术器械和玻璃器皿，可更换不同的喷嘴，用于控制水压及喷洒角度，达到彻底清除污垢的目的。

- A 混合型喷嘴，用于配合真空水泵混合其他小溶液
- B 深锥型喷嘴，用于窄口玻璃器皿
- C 尖嘴型喷嘴，用于各种口径的管道和导管
- D 细堵口型嘴,用于带Luer连接器的注射器和套管针;
- E 短锥散型喷嘴,用于导液管
- F 硅胶盖口型喷嘴,用于导液管;
- G 花洒型喷洒,用于器械表面的喷洒
- H 粗堵口型喷嘴,用于带连接器的注射器和套管针.

#### 四、相关配件

弹簧软管、快速接头、不锈钢挂件、弹簧按键

#### 五、枪体和喷头的消毒与灭菌方法、

- 1、压力蒸汽灭菌（131 作用30分钟或134 作用5分钟）。
- 2、环氧乙烷灭菌（在环氧乙烷灭菌器内，环氧乙烷浓度800mg/L,温度55-60 ，相对湿度60-80，作用6小时）。
- 3、戊二醛消毒灭菌（戊二醛消毒剂有效浓度保证在2%，消毒浸泡20分钟，灭菌浸泡10小时）。
- 4、酸化电解水消毒（1050WV以上高氧化还原电位产生的离子水，PH值2.7，作用10分钟）。
- 5、煮沸消毒（煮沸20分钟）。

#### 六、导管的消毒与灭菌方法：

- 1、环氧乙烷灭菌（在环氧乙烷灭菌器内，环氧乙烷浓度800mg/L,温度55-60 ，相对湿度60-80，作用6小

时)。

2、戊二醛消毒灭菌(戊二醛消毒剂有效浓度保证在2%，消毒浸泡20分钟，灭菌浸泡10小时)。

3、酸化电解水消毒(1050WV以上高氧化还原电位产生的离子水，PH值2.7，作用10分钟)。

## 七、注意事项

1. 操作前必须按照操作说明书安装使用。
2. 保持医用高压水枪的干净，无油和积灰。
3. 定期对医用高压水枪进行清洁工作，防止大量其他物体积淀在医用高压水枪的零部件上面。
4. 不能在含有易燃性气体和大量粉尘的环境中使用。

联系电话 18136289831

泰州朵朵科技友情提示：

我对出厂后的产品一律实行三包，在质保内确因质量问题我厂负责免费维修。

您只要致电：18136289831 我们可以帮您推荐符合您要求的医用洗手池,医用消毒柜,医用高压水枪,内窥镜储存柜,内窥镜清洗消毒槽,内窥镜清洗中心,内镜清洗工作站等相关产品！

由消毒灭菌设备，方案解决专家泰州朵朵科技

为您提供的[内窥镜清洗消毒槽](#),[内窥镜储存柜](#),[医用洗手池](#),[不锈钢器械清洗槽](#)

,[医用消毒柜](#),[医用高压水枪](#),[婴儿洗浴中心](#),[内镜清洗工作站](#)系列产品在您成功下达订单后表示您已成为泰州朵朵科技的亲密的合作伙伴，泰州朵朵科技同时将在以后的合作中为您提供更加完美的服务，并且您可以享受您购买的[医用洗手池](#),[医用消毒柜](#),[医用高压水枪](#),[内窥镜储存柜](#),[内窥镜清洗消毒槽](#),[内窥镜清洗中心](#),[内镜清洗工作站](#)以外其他产品的更加优惠的价格。详情请您拨打全18136289831。期待与更多的医院代表和代理商朋友成为合作伙伴！