

肺活量测试仪，体质测试仪，继豪肺活量测试仪

产品名称	肺活量测试仪，体质测试仪，继豪肺活量测试仪
公司名称	常州继豪电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:继豪 型号:JH-1663 产地:常州
公司地址	江苏省常州市武进区湖塘城西工业园定安中路60号
联系电话	13616111477 13606142534

产品详情

肺活量测试仪，体质测试仪，继豪肺活量测试仪

单机部分：

- 1、检测肺通气功能，反映人体肺功能的容积与扩张力
- 2、防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据
- 3、吹管优化设计与处理，不易产生积水
- 4、技术参数：

测量范围：50 ~ 9999ml

分度值：1ml

误差：±1.5%FS

工作环境：0 ~ 40 湿度 < 90%

存储环境：-10 ~ 50 湿度 < 75%

主机部分：

- 1、主机双芯片存储备份数据，存储量可达6万-10万条，全程语音提示（可调节音量）

- 2、主机中英文7寸彩色触摸屏显示操作界面，背光亮度可调节，可选配增加VGA接口功能
- 3、主机预留USB接口，可直接连电脑下载1万-2万条名单，同步显示姓名、编号、性别等详细测试信息
- 4、主机同时具有英文、数字（有自动递增功能）输入学号，支持1-30位数字、英文学号输入
- 5、主机也支持非接触智能IC卡、ID卡、激光条码扫描枪等多种身份信息输入的功能
- 6、主机与电脑之间采用2.4G无线传输，传输距离可达100米以上，多台主机可同时集中上传数据至电脑评分软件内
- 7、主机同时具有成绩查询、删除、一键恢复数据、一键初始化等强大功能
- 8、主机兼容多种测试项目，不同的测试项目主机可相互替换进行测试，兼容互通，确保测试的稳定性

肺活量测试仪，体质测试仪www.tzjkcsy.com

肺活量

1. 测试目的

测试学生的肺通气功能。

2. 场地器材

电子肺活量计。

3. 测试方法

房间通风良好；使用干燥的一次性口嘴（非一次性口嘴，则每换测试对象需消毒一次，每测一人时将口嘴下倒出唾液并注意消毒后必须使其干燥）。肺活量计主机放置平稳桌面上，检查电源线及接口是否牢固，按工作键液晶屏显示“0”即表示机器进入工作状态，预热5分钟后测试为佳。

首先告知受试者不必紧张，并且要尽全力，以中等速度和力度吹气效果好。令被测试者面对仪器站立、手持吹气口嘴，面对肺活量计站立试吹1至2次，首先看仪表有无反应，还要试口嘴或鼻处是否漏气，调整口嘴和用鼻夹（或自己捏鼻孔）；学会深吸气（避免耸肩提气，应该象闻花式的慢吸气）。受试者进行一两次较平日深一些的呼吸动作后，更深得吸一口气，屏住气向口嘴处慢慢呼出至不能再呼为止，防止此时从口嘴处吸气，测试中不得中途二次吸气。吹气完毕后，液晶屏上终显示的数字即为肺活量毫升值。每位受试者测三次，每次间隔15秒，记录三次数值，选取大值作为测试结果。以毫升为单位，不保留小数。

4. 注意事项

（1）电子肺活量计的计量部位的通畅和干燥是仪器准确的关键，吹气筒的导管必须在上方，以免口水或杂物堵住气道。

（2）每测试10人及测试完毕后用干棉球及时清理和擦干气筒内部。严禁用水、酒精等任何液体冲洗气筒内部。

（3）导气管存放时不能弯折。

(4) 定期校对仪器。

常州继豪电子有限公司www.jsjhaodz.com