

家用荷兰365型便携分体冲水移动马桶坐便器

产品名称	家用荷兰365型便携分体冲水移动马桶坐便器
公司名称	北京创佳瑞鑫科技开发有限公司
价格	880.00/台
规格参数	波塔波替:马桶 365型:PP树脂 移动:便捷省力
公司地址	北京市石景山区古城西街25号
联系电话	010-52632102 13661262237

产品详情

荷兰便携式冲水马桶

型号：PPQ-365型(荷兰进口)

便携式座便器的使用范围：

行动不便的老人；孕妇儿童；

无卫生设施的地区，野外工作者、矿井地下工作者；

敬老院，养老院，医院以及需特殊照顾的伤残病人员；

旅游景点的临时厕所，车辆配备；

水上工作和旅游且无卫生设施的船舶。

- 产品外形尺寸 414mm (高) x 383mm (宽) x 427mm (长)
- 座位高度 (离底座接触面) 408 mm
- 颜色 白
- 手动活塞泵冲水：易于使用且保证水流强劲
- 废水箱配有水位指示器
- 废水箱容量 21升
- 清水箱容量 15升
- 净重 4.0公斤

· 随产品赠送150毫升装的艾卡金降解液和艾卡灵清洁液各一瓶

专用清洗剂 专用降解剂三年质量保证，高品质的欧洲设计

容量：1000毫升 市场价：98元作用:将粪便化解为细小颗粒，并具有极强的掩臭及抑制细菌繁殖的功能，从而达到清洁的效果。气温低于零下20摄氏度凝冻，解冻后使用同样有效。荷兰移动马桶使用：器后侧中部的分离开关，将坐便器分为两部分：上部分为净水箱、下部分为污物箱。加剂:将污物入口的隔离板的降解剂，21公升的污物需加入60-100毫升的降解剂，同时加入60-100毫升清水，然后关闭隔离板。注水:将净物箱连成一体）打开净水箱注水口，注满清水后,将盖拧紧。（注：绝不可以将降解剂放入净水箱）使用:排泄时，推回污物箱隔离板，排泄物会落入污物箱中，使用后用手压水泵，净水即可冲洗坐便器。推回污物箱隔离板，准备下次继续使用，按分离步骤分离坐便器（需将隔离板推严）。将污物箱提到厕所或是其它地点。将排污管转到管口赶上，打开，同时按下空气减压阀，排汇物会缓缓流出。冲洗:倾倒完毕后，需用清水冲洗污物箱，并按“加剂”步骤加入重新使用。