

豫北卫材 加强型 气管插管

产品名称	豫北卫材 加强型 气管插管
公司名称	河南省豫北卫材有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	品牌:豫北卫材 型号:多种规格 产地:河南省新乡市长垣县
公司地址	河南 长垣县 河南省蒲东工业园区
联系电话	15090305663 15090305663

产品详情

【产品名称】：加强型气管插管

【型号规格】：2#、2.5#、3#、3.5#、4#、4.5#、5#、5.5#、6#、6.5#、7#、7.5#、8#、8.5#、9#、9.5#、10#、10.5#、11#

【注册证号】：豫食药监械(准)xxxx第xxxxxxx号

【生产许可证】：豫食药监械生产许20100155号

【产品标准】：YZB/豫0191-2013

【主要结构及性能】：本品主要由接头，管体、充气管、套囊、充气阀组成。

- 1、普通型和加强型插管规格及基本尺寸应符合YY0337.1中4.1及表1和YY0337.1中4.2的规定。
- 2、插管应无污渍、光滑、杂质和破损等现象，加强型应无钢丝外漏。
- 3、插管的斜面、套囊、套囊充气管、接头、插管弧度、墨菲孔的物理性能应符合YY0337.1中的规定。
- 4、加强型耐负压性：
加强型插管带钢丝管体在40Kpa的负压下，持续15S，应无扁瘪现象发生。
- 5、插管应无菌，无菌有效期两年。
- 6、应无细胞毒性。

- 7、应无刺激。
- 8、应无迟发型超敏反应。
- 9、插管若经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10 μg/g。

【适用范围】：气管插管通过病人的口腔或鼻腔插至气管，做麻醉、输氧时的通气管道。病人通过它与外部的过滤器、热湿交换器、呼吸管道、麻醉呼吸机连接，形成一个完整的维持病人呼吸的系统。

【使用方法】：

- 1、使用前，应检查产品包装是否完好，如有破损禁止使用。
- 2、把本产品安装在病人和呼吸管路之间，尽量靠近病人。
- 3、过滤微粒、病毒和调整呼入气体的温湿度。
- 4、产品需至少24小时更换一次。

【注意事项】：

- 1、本品属于一次性使用，用后请销毁。
- 2、本产品经环氧乙烷灭菌，无菌有效期两年。
- 3、用前请检查包装，包装破损，禁止使用。
- 4、请严格遵守相应的手术规程，禁止违规作业，仅限专业人员使用。
- 5、对产品材料过敏者禁用；
- 6.喉部水肿、气道急性炎症及咽喉部脓肿患者慎用；
- 7.胸主动脉瘤压迫气管、严重出血体质的患者慎用；

【贮存】：应贮存在相对湿度不超过80%，无腐蚀性气体，清洁、通风良好的库房内。

【禁忌症】：喉部水肿、气道急性炎症及咽喉部脓肿。胸主动脉瘤压迫气管、严重出血体质的患者慎用患者慎用。