

小乐医用退热贴

产品名称	小乐医用退热贴
公司名称	武汉孚莱医药科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区
联系电话	18627909171

产品详情

产品性能结构及组成：

本品通过利用亲水性高分子凝胶所含大量水份进行扩散，转运到皮肤，通过水份的气化带走热量，从而达到物理降温、冷敷理疗的作用。本品主要由塑料膜、无纺布、薄荷脑、对羟基苯甲酸、水、高分子物质（包含甘油）组成。

【生产批号】2021年出厂，日期不断更新

【规格】40mm × 110mm

【包装】每片独立包装，每袋一贴

退热贴的主要成分：

主要由背衬层、高分子水凝胶层（为其主体部分）、防粘层等部分组成，并包含大量水份及薄荷、冰片等天然植物提取物。

退热贴的用途：

适用于各种原因引起的发热的物理降温；

使用方法：

- 1、沿缺口撕开包装袋，取出贴片，揭开透明薄膜，将胶贴面紧贴于额头、脖颈、太阳穴或其他需要降温、冷敷的部位；可根据需要剪成相应大小使用；
- 2、为加快降温速度，可加用数贴同时贴在人体左右颈总动脉、左右腋下动脉、左右股动脉处；
- 3、本品用于物理降温，如高温持续不退，应请医生诊治；
- 4、居家备用时，放入冰箱冷藏室冷藏后再使用，冷却效果更佳（勿放入冷冻室）。

注意事项：

- 1、伤口或眼睛部位均不适用。
- 2、如使用中发现皮肤肿胀，发炎及引起斑疹等异常现象时，应停止使用，严重者请医生诊治；
- 3、本品属医疗器械，不属于医药品，若持续发烧久久不退时，应请医生诊治；
- 4、初生婴儿及小童应在大人监督下才可使用，避免误食及贴在口、鼻上；
- 5、不要覆盖在有汗水或头发、眉毛等部位，否则难以紧贴。