

好思达 思达型折叠多功能可调节定制铝合金轮椅

产品名称	好思达 思达型折叠多功能可调节定制铝合金轮椅
公司名称	西安好思达康复器具有限公司
价格	2888.00/辆
规格参数	品牌:好思达 型号:SY —100KGHSDQDA1 产地:蓝田
公司地址	陕西省西安市蓝田县华胥镇西北工业园新港八路 2号
联系电话	18966701273

产品详情

轮椅是康复的重要工具，不仅是肢体伤残者的代步工具，更重要的是使他们借助于轮椅进行身体锻炼和参与社会活动。

产品名称：手动轮椅车

型号规格：SY —100KGHSDQDA1

一、轮椅结构组成

车架、驱动轮、手圈、导向轮、把手、手刹、扶手、座椅、靠背、脚踏支撑等组成

二、产品性能指标

1.车轮着地性：所有车轮平稳着地

2.静态稳定性：纵向 10° ，侧向 15°

3.驻坡性能： 8°

4.滑行偏移量： 350mm

5.最小回转半径： 0.85m

6.最小转换宽度： 1.5m

三、轮椅的使用准备

轮椅在出厂时已安装完毕，并折叠包装，脚踏板单独放置。

**以下三个简单步骤可使轮椅做好使用准备：

1.在打开轮椅时，用手按压椅座撑布的支撑杆，轮椅就会自动打开。

2.将脚踏板取出后，垂直握住脚踏板，将脚踏板上方黑色圆柱对准前导向轮上方脚踏固定件的圆孔内从侧面插入到卡槽中，向内转向，听到“咔”的一声，即为锁定器锁定，脚踏板就固定好了。

3.将背衬垫与座套粘接好。

四、产品特点

材料：

*车架材料为铝镁合金，合金牌号主要为6061和6082，6系铝合金，在保证车架强度的情况下，也更加轻便。

*车架上的各类连接器大部分为尼龙材料，牢固耐用。

*各部位的紧固件全部选择304不锈钢产品，保证产品强度和耐用性，也保证产品的美观。

*车架结构：车架设计为可快速折叠的结构，折叠起来后总宽不超过34CM，方便外出携带及收纳。

*轮胎：后部驱动轮选用了24寸充气轮胎，质量轻，越障能力强，普通路面上的坑洼容易行驶，满足使用者在室外的需求。

*驱动轮轮辋、及手轮圈为铝合金材质，轻巧、美观。

*前方导向轮选用6寸充气轮胎，配合后驱动轮提高越障能力。

*前后轮都为充气轮胎，减震性能好。

*刹车：驻车式刹车杆，安全可靠，能在斜坡上刹住。

其它特点：

多功能调节:除普通多功能轮椅具有的扶手可向后掀起、脚踏板可掀起、拆卸功能以外，此款轮椅可以通过对管件与尼龙件的配合调整来进行多功能调节。

*调整座位的高度和倾斜度

*改变轴距

*调整导向轮位置

*调整轮胎手动刹车杆

*调整脚踏板的角度

*调整脚踏板的高度

*调整扶手的高度

*调整座深

*快速拆卸：轮椅大轮快速装卸装置，脚踏板总成也可快速装卸。

五、包装说明

*根据GB/T13800-2009中5.7.3的要求，包装箱上应标明产品名称、商标、数量、净重、毛重、箱体尺寸、生产商名称、地址。标志应符合GB/T191规定。

*包装内付产品说明书、产品合格证及一套安装工具。