

# 新生儿一次性血压袖套袖带无囊无纺布

产品名称	新生儿一次性血压袖套袖带无囊无纺布
公司名称	深圳康瑞通精密仪器有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:CORITON 型号:1605A 产地:深圳
公司地址	宝安区石岩镇水田工业区
联系电话	0755-89581055 18589056916

## 产品详情

无创血压的原理:

无创血压测量方法一般是采用振荡法，即利用捆绑在手臂上袖带，并通过充气泵向袖带充气以阻断血管中脉动的传播，

再以线性或阶梯放气形式逐步对袖带放气，并借助于连通于气路的桥路压力传感器和相应的放大、

滤波电路、CPU控制等将通过袖带传递到气路中的脉动信号和压力信号转换成数字信号，进一步对这个脉搏波、

袖带压进行适当的数据处理，得到包含脉搏波变换趋势的系列脉搏波和对应的袖带压力，利用最大脉搏处的袖带压将对

应于受试者的平均压和一些经验的比例系数算法就可以计算出所需要的收缩压、

舒张压、平均压以及脉率等结果.

维护与清洁:

不要挤压袖带上的橡皮管.

不要让水或清洗液入监护仪前端的连接器插座,以防损坏仪器.

当清洁监护仪时,只擦拭连接器插座的外周,而不要擦拭它的内部.

没有和监护仪连接或正在清洗时,总要将盖帽安放在橡胶管上面.这样防止不小心而使液体入橡胶管并吸入模块中.

袖带可以通过常规的在热气烘箱中进行高温灭菌,气体或放射消毒法进行消毒,或者是浸入去污溶液中灭菌.

但要记住在采用此法时,要取走橡胶袋.袖带不能干洗,袖带可以机器洗也可以手洗,手洗可以延长使用寿命.

在清洗前,取出乳胶橡皮袋.洗净后等袖带干透再重新把橡胶袋装入

联系人：郑小姐 | 电话微信：185-8905-6916 | QQ:781327111