

百草堂无烟4mm无烟艾条4mm无烟美容艾条 小号美容灸棒专用

产品名称	百草堂无烟4mm无烟艾条4mm无烟美容艾条 小号美容灸棒专用
公司名称	南阳市百草堂天然艾草制品有限公司
价格	840.00/件
规格参数	
公司地址	中国 河南 南阳市宛城区 白河办事处李八庙村
联系电话	86 0377 66086699 15838719988

产品详情

品牌	无烟艾条4mm无烟美容艾条 条百草堂无烟4mm	型号	无烟美容艾条
产地	中国南阳	箱装数量	1000

无烟灸条，在燃烧时产生的微烟对人畜无害，气味芬芳，还能达到消毒杀菌、除害防病的目的，所以民间至今一直在使用。

【产品名称】眼面香薰温灸棒（小棒）专用百草堂无烟灸条

【主要功能】温经通络，益气驱风，活血止痛，改善局部循环，美容养颜，增加免疫力。

【配合适用】适用眼面美容温灸棒使用，下面有规格尺寸。

【规格尺寸】 4mm*120mm*70支

7mm*120mm*30支

12mm*120mm*10支

14mm*120mm*5支

【操作方法】

- 1、将艾条一端点燃，将燃端放入温灸棒中。
- 2、轻压弹力使艾条落至顶端，以水平或倒置动作调整艾条与顶端的距离，使温度适度。

- 3、以手掌试温度高低，确定温度适中，即可开始温灸。
- 4、每次灸5-15分钟，使穴点经络疏通皮肤光滑，红润。

【注意事项】

- 1、施灸时,认真操作,防止灼伤皮肤。
- 2、温灸时先灸左方，再灸右方。
- 3、温灸后半小时内不要用冷水洗手或洗澡。
- 4、温灸后要喝较平常多的温开水(绝对不可喝冷水或冰水)，有助器官排出体内毒素。
- 5、饭后一小时内不宜温灸，脉搏每分钟超过90次以上禁灸，过饥、过饱、酒醉禁灸，孕妇禁用，身体发炎部位禁灸。

【温灸棒的使用方法】

- 1.将艾草条自包装盒取出,点燃后从尾部将艾草条送入温灸棒之中。
- 2.轻按尾部,使艾草条落至顶端,以水平或倒置之动作,将艾草条调整至适当之距离。
- 3.经手掌试验温度之高低,确定温度适中后,即可开始使用。
- 4.每次使用前须在皮肤,抹上艾叶香薰精油。
- 5.灸器点上火后不可悬空过久,以免接触皮肤时温度过高以致烫伤,如悬空太久,可先以手掌将灸器之温度搓低后再继续使用.每隔一段时间,应将灸烬敲除去。
- 6.熄火时,只要将上端弹簧部分按下同时倒置灸器使灸条滑入管内,停留十分钟即熄灭。

【注意事项】施灸时,认真操作,防止灼伤皮肤。